

1/2-

## URGENT – Notification de sécurité produit Notice corrective de matériel médical

### *Support du capteur mobile*

#### *Support du capteur mobile – problème de fixation*

<b>Systèmes concernés</b>	Support du capteur mobile (9890-010-88152)
<b>Description du problème</b>	Si le mécanisme de verrouillage de la fixation mobile du support du capteur mobile n'est pas correctement réglé ou n'est pas fixé, le capteur mobile est susceptible de tomber lorsque la fixation mobile est située en bas (sous le capteur) et qu'une pression supplémentaire est exercée. Ceci peut se produire lorsque le capteur est pivoté dans le sens horaire pour passer du mode paysage au mode portrait.
<b>Risques liés au problème</b>	Le capteur-plan portable sans fil (WPD) est fixé au support du capteur mobile à l'aide d'un mécanisme de verrouillage. Les quatre vis à tête fraisée servant à maintenir en place le mécanisme de verrouillage sont susceptibles de se desserrer. Si cela se produit et que le mécanisme se détache alors que le support a été pivoté à 90° dans le sens horaire à partir du mode paysage, le capteur risque de tomber.
<b>Identification des systèmes concernés</b>	Tous les supports de capteur mobile
<b>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</b>	Le client doit procéder à la vérification du mécanisme de verrouillage du support du capteur mobile. Le mécanisme de verrouillage peut être déplacé sans qu'il soit nécessaire d'actionner le bouton de commande. Le support ne doit pas être pivoté dans le sens horaire.
<b>Actions menées par Philips France Commercial</b>	Philips effectuera les actions suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fixation des quatre vis concernées</li> <li>2. Positionnement correct de la vis du bouton de démontage</li> <li>3. Test de la force de serrage</li> </ol> <p>Un ingénieur de maintenance Philips vous contactera afin de programmer cette action.</p> <p>Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence d'action corrective 71200174.</p>

2/2-

**URGENT – Notification de sécurité produit  
Notice corrective de matériel médical**

***Support du capteur mobile***

***Support du capteur mobile – problème de fixation***

<p><b>Informations complémentaires et Assistance Technique</b></p>	<p>Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole.</p> <p><b>Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips</b></p>
--	---