

«Société»
«Nom»
«Adresse1»
«adresse2»
«Code_postal»«Ville»

Paris, le 12 Mai 2004

Ref : DLR / Lettre utilisateurs **BIOXAL M**

Concerne : Rapport du contrôle de marché des désinfectants à base d'acide peracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles.
BIOXAL M

Madame, Monsieur,

Votre établissement de santé est utilisateur de **BIOXAL M** et nous vous remercions pour votre confiance.

L'utilisation de notre désinfectant s'inscrit dans le cadre de la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles.

BIOXAL M dont le principe actif est l'acide peracétique, a fait récemment l'objet d'un premier examen approfondi par l'**AFSSAPS**.

Les données générales sur les désinfectants à base d'acide peracétique et plus spécifiques quant aux produits commercialisés, figurent dans le rapport mentionné en rubrique qui vient de nous être adressé.

Une copie de ce rapport est jointe à la présente.

Le travail de fond qui a été entrepris, permet en particulier d'affiner les recommandations d'emploi.

Il est donc important de noter deux éléments nouveaux qui seront repris dans notre Guide de l'Utilisateur de **BIOXAL M** :

1. Contrôle par des bandelettes toutes les 4 heures d'activité consécutive et à la reprise d'activité après interruption
2. Nombre maximal de trempages d'endoscopes : 50
(la durée maximum d'utilisation reste fixée à 7 Jours)

Restant à votre disposition pour vous assister dans l'utilisation de **BIOXAL M**,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

D. LE ROUZIC

☎ 01 40 62 59 85

☎ 01 40 62 57 45

PJ