


# INSTALLATION DE LA POMPE GEMSTAR™

## 1. Retirer le capuchon protecteur du perforateur.

- Perforer la poche à l'aide du perforateur.

## 2. Connecter la tubulure principale à la valve anti-siphon comportant un anneau bleu, située sur la branche courte de l'extension en Y.

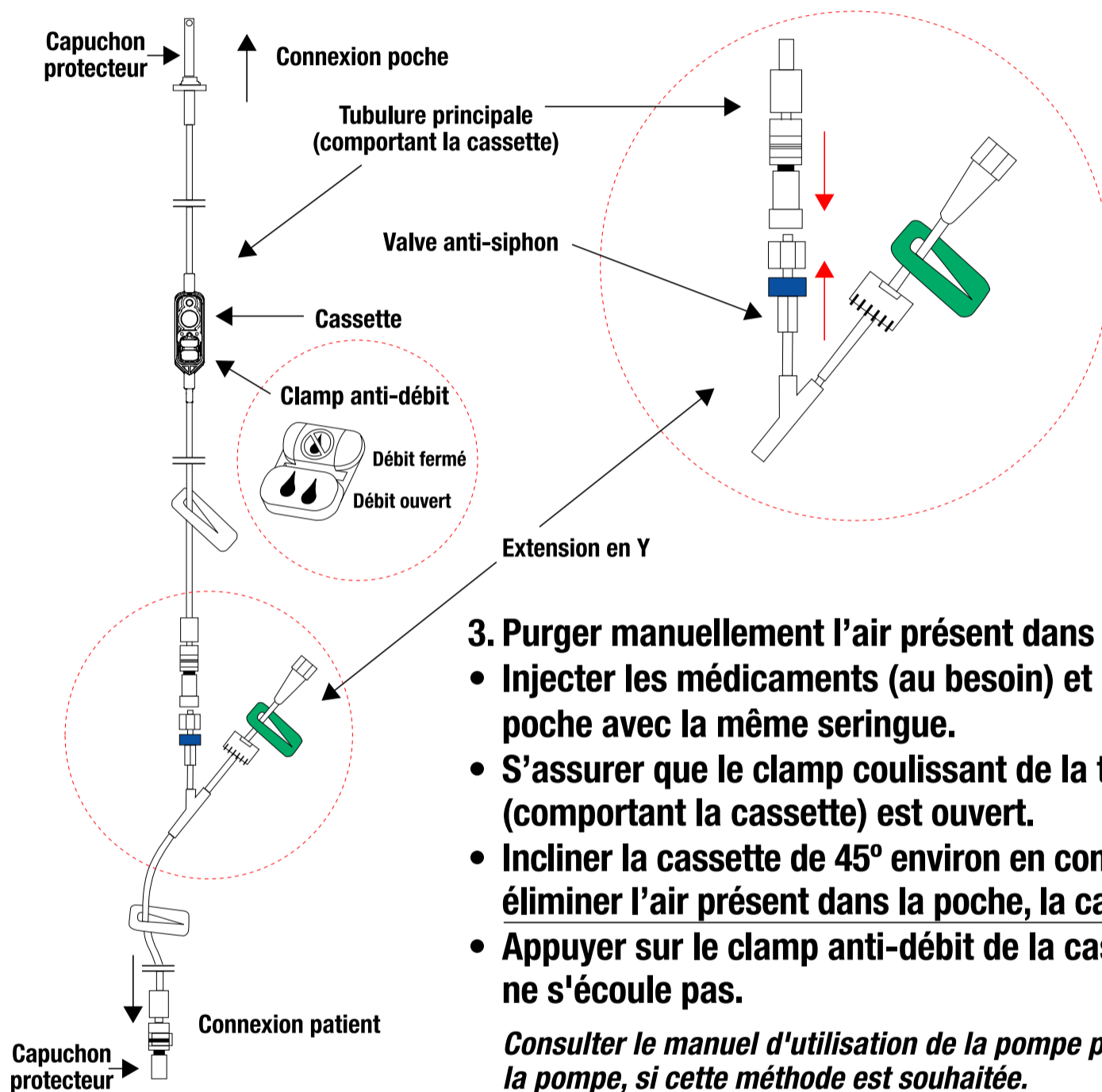

## 3. Purger manuellement l'air présent dans la tubulure :

- Injecter les médicaments (au besoin) et aspirer l'air de la poche avec la même seringue.
- S'assurer que le clamp coulissant de la tubulure principale (comportant la cassette) est ouvert.
- Incliner la cassette de 45° environ en comprimant la poche pour éliminer l'air présent dans la poche, la cassette et la tubulure.
- Appuyer sur le clamp anti-débit de la cassette afin que le liquide ne s'écoule pas.

*Consulter le manuel d'utilisation de la pompe pour une purge d'air avec la pompe, si cette méthode est souhaitée.*

## 4. Chargement de la cassette :

- Aligner la cassette.
- Insérer la cassette dans son logement avec la valve d'arrêt de débit orientée vers la pompe, jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place. Appuyer sur la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (un ou plusieurs clics sont audibles). Lorsque la cassette est correctement installée, elle ne peut être retirée de son logement qu'en appuyant sur le bouton d'éjection de la cassette.
- S'assurer que la cassette est correctement installée.
- Aligner la tubulure dans la rainure prévue à cet effet et s'assurer qu'il n'y a pas de débit lorsque la pompe est à l'arrêt.
- Retirer le capuchon protecteur et connecter la tubulure de la pompe au patient.

**Ne pas retirer la valve anti-siphon. Celle-ci doit être connectée afin d'éviter un débit par gravité (débit libre).**