

Saint-Denis, le

Référence du document : DM-RECO 03/02

A l'attention des correspondants locaux de  
matériovigilance,  
pour diffusion aux services d'endoscopie,  
au CLIN, aux pharmaciens et aux  
ingénieurs biomédicaux

**M  
A  
T  
E  
R  
I  
O  
V  
I  
G  
I  
L  
A  
N  
C  
E**

## **INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS**

**Objet : AVIS de SECURITE concernant le nettoyage et la désinfection des endoscopes (canaux auxiliaires)**

L'observance des recommandations en vigueur pour le nettoyage et la désinfection des endoscopes souples est essentielle afin de réduire le risque nosocomial.

L'analyse du risque nosocomial fait apparaître que la transmission d'infections lors des endoscopies peut être liée au non-respect des procédures recommandées de lavage / désinfection, en particulier une désinfection inefficace des valves ou canaux de l'endoscope liée à la configuration du matériel ou due à la méconnaissance de la part des utilisateurs de cette configuration.

La multiplication des endoscopes à canaux auxiliaires peut accroître un risque de défaut de désinfection, dû soit à une méconnaissance de l'existence de ce canal auxiliaire sur les endoscopes, soit à un non respect des recommandations du fabricant.

C'est pourquoi l'Afssaps recommande aux utilisateurs et aux équipes chargées du lavage et de la désinfection des endoscopes :

- de vérifier systématiquement si les endoscopes utilisés sont équipés de canaux auxiliaires,
- dans ce cas, de vérifier dans le manuel utilisateur de l'appareil correspondant la procédure de lavage / désinfection spécifique à ces canaux et s'assurer du respect des recommandations du fabricant en la matière,
- de vérifier que les tubulures utilisées pour procéder au lavage-désinfection des canaux auxiliaires sont bien
  - les tubulures de connexions spécifiques à chaque canal et prévues par le fabricant d'endoscope dans le cas d'une procédure manuelle, et
  - les tubulures de connexions spécifiques à chaque canal et prévues par le fabricant de laveur-désinfecteur automatique dans le cas d'une désinfection par automate.

L'Afssaps a demandé aux fabricants d'endoscopes d'informer les utilisateurs de l'existence de ces canaux auxiliaires et des opérations de lavage/désinfection à leur appliquer.