














## Détail de la procédure concernant votre pompe D-TRON, en attendant l'échange avec une pompe D-TRONplus

**1. Régler le volume des bips sonores au maximum (niveau 4).** Pour cela, vous pouvez vous référer au paragraphe 4.3 de votre manuel d'utilisation D-TRON « Régler le volume sonore » (P.70). Le signal sonore vous avertit de l'administration involontaire d'un bolus. Vous pourrez ainsi l'interrompre rapidement. En réglant le volume sonore sur le niveau 4, cela éveillera plus facilement votre attention notamment si vous êtes occupé ou en train de dormir. Vous pouvez aussi régulièrement vérifier l'écran de votre pompe D-TRON, notamment si, pour une raison ou pour un autre, vous ne pourriez entendre les signaux sonores ou sentir les vibrations.

Pour régler le volume sonore:




- Presser  9 fois pour sélectionner le menu « réglage »
- Presser  pour confirmer ce choix
- Presser  2 fois pour sélectionner la fonction « volume des signaux sonores »
- Presser  pour confirmer ce choix. La valeur affichée clignote. Cela vous indique que vous pouvez procéder au réglage.
- Presser  jusqu'à l'affichage du chiffre 4. Attention, si vous laissez le chiffre 0, cela reviendrait à couper les signaux sonores.
- Presser  pour confirmer votre choix. Votre pompe D-TRON retourne automatiquement à l'écran de base.

**2. Régler la progression du bolus sur 0,1 U.I.** Pour cela, vous pouvez vous référer au paragraphe 4.4 "régler la progression du bolus" de votre manuel d'utilisation D-TRON. Cette procédure vous permet de limiter les quantités d'insuline administrées par un bolus involontaire, au cas où cela arriverait

- Presser  9 fois pour sélectionner le menu « réglage »
- Presser  pour confirmer ce choix
- Presser  3 fois pour sélectionner la fonction « progression du bolus »
- Presser  pour confirmer ce choix. La valeur affichée clignote. Cela vous indique que vous pouvez procéder au réglage.
- Presser  ou  jusqu'à l'affichage de la valeur 0.1.
- Presser  pour confirmer votre choix. Votre pompe D-TRON retourne automatiquement à l'écran de base.






### 3. Administrer un bolus uniquement à l'aide de la fonction « Scroll bolus » et ne plus utiliser la fonction « bolus standard ».

Vous pouvez, bien sûr, continuer à utiliser la fonction bolus retard.

La fonction « Scroll bolus » est décrite dans le paragraphe 3.1.2 « Scroll bolus » de votre manuel d'utilisation D-TRON. Contrairement à la fonction « Bolus standard », la fonction « scroll bolus » vous permet d'utiliser une progression de bolus de 0,1 U.I. Par cette fonction, en maintenant la touche  ou  enfoncé, la quantité de bolus augmente ou diminue jusqu'à ce que la touche soit relâché. Une fois la quantité de bolus définie, il faut alors la confirmer en pressant la touche . Le bolus est administré immédiatement.

#### Comment délivrer un bolus par la fonction « Scroll bolus »:

Votre pompe D-TRON doit être en mode RUN (marche).

- Presser  1 fois pour sélectionner le menu bolus.
- Presser  pour activer la fonction Scroll bolus.
- Presser  pour augmenter ou  pour diminuer la quantité d'insuline.
- Presser  pour confirmer la quantité. Une fois le bolus administré, votre pompe D-TRON se met ensuite automatiquement en mode RUN. (marche)


La procédure d'annulation d'un « scroll bolus » est décrite dans le paragraphe 3.1.2 de votre manuel d'utilisation D-TRON (P.54)

#### **Que faire si malgré tout, un bolus involontaire se produit ?**









- Vous pouvez l'interrompre immédiatement en retirant l'adaptateur de la pompe. (Tournez l'adaptateur sur la position "insérer" et retirez-le de votre pompe avec la cartouche).
- Annulez l'administration selon la procédure décrite ci-dessous pour savoir quelle quantité d'insuline à été administrée.
- Vérifiez votre glycémie régulièrement (au moins toutes les 2 heures) afin de détecter de possible hypoglycémies.
- Si un bolus involontaire de grande quantité est administré, contactez immédiatement votre médecin et suivez ses instructions.

#### **Comment interrompre un bolus ?**

Cette procédure est décrite dans le paragraphe 3.1.1 "Standard bolus" de votre manuel d'utilisation D-TRON:

- Avant la confirmation du bolus: en pressant sur , le quantité affichée est 0.0. Vous entendrez un signal sonore

bas. Si aucun nouveau bolus n'est programmé, la pompe retourne à l'écran de base au bout de 60 secondes.

- Lors de/après confirmation: En pressant sur l'une des touches ,  ou  la confirmation est interrompue et la pompe retourne à l'écran de base. Vous allez entendre 3 bips sonores et le bolus ne sera pas délivré.
- Pendant l'administration de l'insuline: L'interruption peut se faire simplement en passant la pompe en mode Stop. Pour cela, il faut presser  2 fois et  1 fois. La délivrance d'insuline sera interrompue. Pour remettre la pompe en mode Marche (RUN), pressez  et . Une fois la pompe en mode Marche (RUN) vous pouvez voir la quantité d'insuline administrée en pressant sur . Le bolus le plus récent avec date et heure est affiché. Arrêtez d'utiliser votre pompe D-TRON si celle-ci administre un bolus de façon involontaire et contactez votre prestataire.