

## LABORATOIRE TERUMO FRANCE SA

Batiment Uranus - Rue Hélène Boucher - Parc Ariane  
78284 GUYANCOURT CEDEX  
Tél : (33) 01 30 96 13 00  
Fax : (33) 01 30 43 60 85 / 01 30 96 13 40

Le 11 Janvier 2005

**A l'attention :** des Clients utilisant des tubes VENOSAFE SP (tubes secs) et VENOSAFE SAS (tubes gel), conjointement avec un automate IMMULITE 2000 de marque DPC®

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer qu'il existe à l'heure actuelle une incompatibilité entre nos tubes secs VENOSAFE™ (VF-xxxSP), nos tubes gel VENOSAFE™ (VF-xxxSAS) et l'automate IMMULITE® 2000 de DPC lors de la détermination de certains paramètres d'hormonologie.

Récemment quelques laboratoires nous ont reporté des écarts de résultats pour les paramètres ci-dessous, ce qui a été confirmé par la société DPC. Ces écarts par excès ou par défaut ont été détectés lors de dosages comparatifs sur tube verre VENOJECT®.

<b>Paramètres</b>	<b>Biais</b>
Cortisol	+ 20%
FSH	-17%
LH	-20%

Dans l'attente de la fin de nos investigations, **nous conseillons d'utiliser des tubes verre VENOJECT® secs (VT-xxxSP) ou secs avec gel séparateur VENOJECT® (VT-xxxSAS).**

Nous travaillons conjointement avec DPC afin d'apporter dans les meilleurs délais une solution validée. Nous vous tiendrons informé par courrier ainsi que par notre force de vente et notre site web. Vous pouvez aussi adresser vos questions par e-mail : [laboratory.system@terumo-europe.com](mailto:laboratory.system@terumo-europe.com).

Ne connaissant pas la liste exhaustive des clients DPC possédant un Immulite 2000, nous préférons communiquer cette information à tous nos clients VENOSAFE™ tubes secs et secs gel.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés par cette situation, et reviendrons vers vous avec plus de détail dès la solution validée.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Michèle Silvera  
Pharmacien  
Responsable Réactovigilance

Christophe Le Pargneux  
Directeur de division  
Medical Products & Transfusion

## LABORATOIRE TERUMO FRANCE SA

Batiment Uranus - Rue Hééne Boucher - Parc Ariane

78284 GUYANCOURT CEDEX

Tél : (33) 01 30 96 13 00

Fax : (33) 01 30 43 60 85 / 01 30 96 13 40

Les références VENOSAFE™ concernées et leurs équivalences en tubes verre VENOJECT® :

Références VENOSAFE Concernées		Références VENOJECT équivalentes	
<i>Tubes secs</i>	<i>Tubes secs gel</i>	<i>Tubes secs</i>	<i>Tubes secs gel</i>
VF-052SP	VF-052SAS	*	
VF-053SP	VF-053SAS	*	
VF-054SP	VF-054SAS	VT-050SP	VT-054SAS
	VF-075SAS		VT-575SAS
VF-076SP		VT-070SP	VT-076SAS
	VF-106SAS		VT-076SAS
	VF-108SAS		VT-109SAS
VF-109SP		VT-100SP	

\*des tubes VT-030SP, tube de 3ml avec un vide de 3ml, sont également disponibles.