


PROCÉDURE DE MONTAGE ET DE PURGE

DE LA TUBULURE GEMSTAR™ PCA I.V.

RÉFÉRENCE 13262

1 - MONTAGE

Connecter la tubulure principale à la valve anti-siphon identifiée par un anneau bleu (branche courte de l'extension).

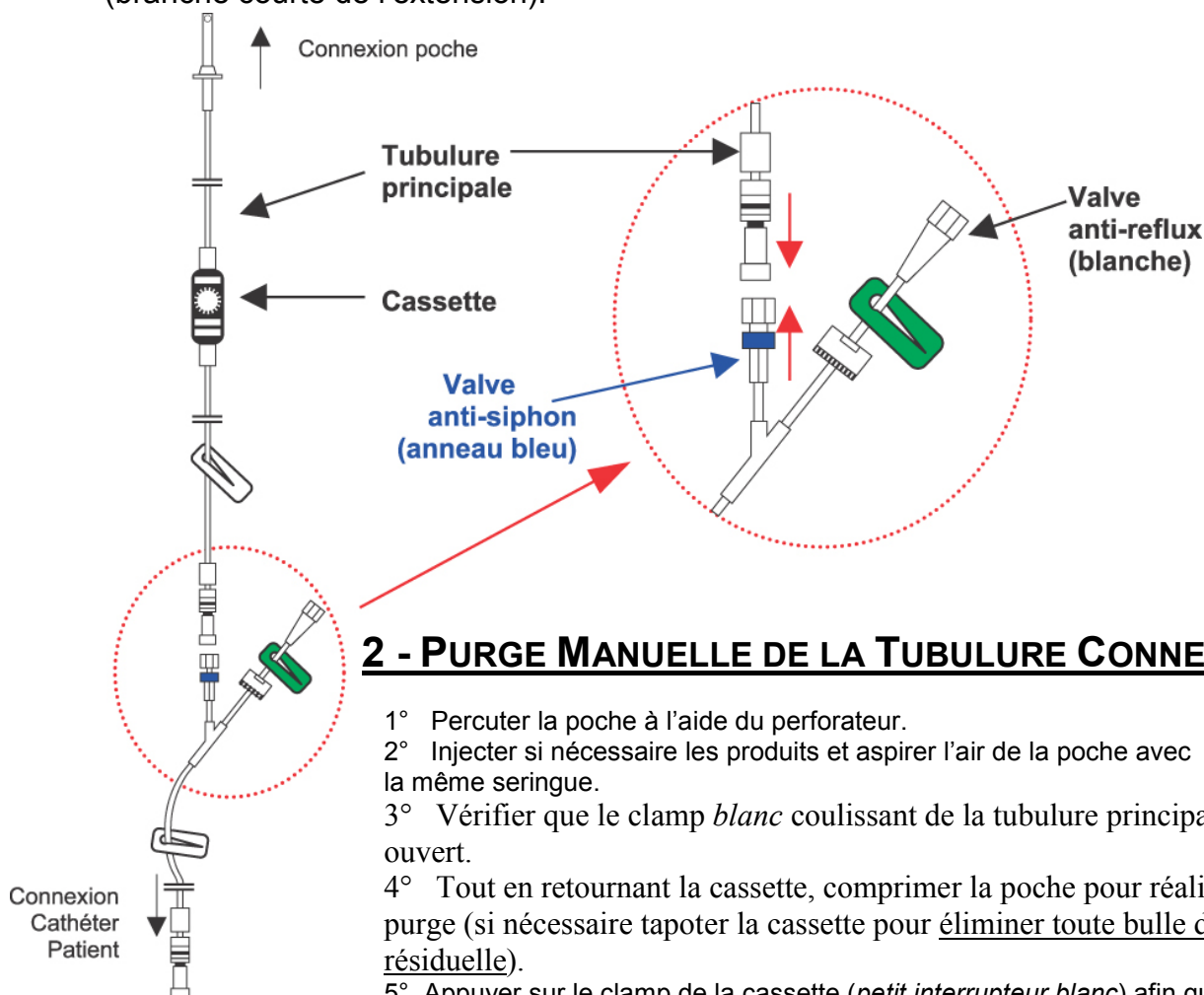

2 - PURGE MANUELLE DE LA TUBULURE CONNECTÉE

- 1° Percuter la poche à l'aide du perforateur.
 - 2° Injecter si nécessaire les produits et aspirer l'air de la poche avec la même seringue.
 - 3° Vérifier que le clamp *blanc* coulissant de la tubulure principale est ouvert.
 - 4° Tout en retournant la cassette, comprimer la poche pour réaliser la purge (si nécessaire tapoter la cassette pour éliminer toute bulle d'air résiduelle).
 - 5° Appuyer sur le clamp de la cassette (*petit interrupteur blanc*) afin que le liquide ne s'écoule pas (*position fermée*).
 - 6° En cas d'absence de perfusion secondaire sur la voie de dérivation, fermer le clamp vert.
- Nb : Vous avez également la possibilité de réaliser une purge avec la pompe. Se référer au manuel d'utilisation GEMSTAR™.*

3 - CHARGEMENT DE LA CASSETTE

- 1° Aligner la cassette.
- 2° Insérer la cassette dans son logement. Appuyer sur la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (double « clic » audible). Lorsque la cassette est correctement installée, on ne peut la retirer de son logement qu'en appuyant sur le bouton d'éjection (*bouton noir*) de la cassette situé sur la pompe.
- 3° **Vérifier que la cassette est bien installée.**
- 4° Aligner la tubulure dans la rainure appropriée (*clamp blanc de la cassette vers le bas et vers l'intérieur de la pompe*) et vérifier que le liquide ne s'écoule pas lorsque la pompe est en mode **ARRÊT**.
- 5° Connecter l'extrémité distale de la tubulure au dispositif de ponction du patient.