

**OBJET :** Notice de vérification de la batterie de la série P

**DATE DE PUBLICATION :** Juillet 2008

**MODELES CONCERNES :** Pousse-seringues IVAC® série P

**STATUT :** Information

## **PRESENTATION**

---

Nous avons reçu des signalements d'incident et nos investigations ont montré qu'un défaut de maintenance de la batterie pouvait altérer le fonctionnement sur batterie du pousse-seringue lors de la déconnexion de l'alimentation secteur. Dans ce cas, le pousse-seringue peut s'éteindre sans alarme.

## **CONCLUSION**

---

### **Attention**

Pour assurer le bon fonctionnement du pousse-seringue, toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées conformément au Manuel de service technique par un personnel qualifié.

Avant d'utiliser un pousse-seringue, son fonctionnement sur batterie doit être confirmé..

Il est indispensable de vérifier que le pousse-seringue continuera de fonctionner correctement avec la batterie lorsqu'il sera déconnecté de l'alimentation secteur. Pour vérifier la continuité du fonctionnement avec la batterie, déconnectez le pousse-seringue de l'alimentation secteur avant de commencer la perfusion, confirmez qu'il continue à fonctionner avec la batterie, puis reconnectez le pousse-seringue à l'alimentation secteur. N'utilisez jamais un pousse-seringue si la continuité du fonctionnement avec la batterie ne peut pas être vérifiée.

## **REFERENCE**

---

### **Manuels de service technique**

P1000 - P3000 V1	1000PB00002
P1000 - P4000 V4	1000PB00048
P5000	1000SM00017
P6000/P7000/TIVA/TCI&TIVA	1000SM00012

**Instructions d'utilisation**

IVAC P1000/P2000/P3000	GB	1000PB01112	IVAC P7000	FI	1000DF00150
IVAC P1000/P2000/P3000	FR	1000PB01113	IVAC P7000 Actilyse	Multi	7001FAOPT7E
IVAC P1000/P2000/P3000	DE	1000PB01114	IVAC P7000 Actilyse	Multi	7001FAOPT7H
IVAC P1000/P2000/P3000	ES	1000PB01115	IVAC TIVA	GB	1000PB00537
IVAC P1000/P2000/P3000	SE	1000PB01116	IVAC TIVA	DE	1000PB00538
IVAC P1000/P2000/P3000	IT	1000PB01117	IVAC TIVA	NL	1000PB00539
IVAC P1000/P2000/P3000	NL	1000PB01118	IVAC TIVA	FR	1000PB00588
IVAC PCAM	EN	1000DF00135	IVAC TIVA	ES	1000PB00541
IVAC PCAM	DE	1000DF00137	IVAC TIVA	SE	1000PB00542
IVAC PCAM	FR	1000DF00138	IVAC TIVA	PT	1000PB00591
IVAC PCAM	NL	1000DF00139	IVAC TIVA	IT	1000PB00592
IVAC PCAM	ES	1000DF00140	IVAC TIVA	DK	1000PB00593
IVAC PCAM	SE	1000DF00142	IVAC TIVA	FI	1000PB00595
IVAC P6000	Mult i	6001FAOPT71	IVAC TIVA & TCI	GB	1000PB00544
IVAC P6000	Mult i	6001FAOPT72	IVAC TIVA & TCI	FR	1000PB00610
IVAC P6000	Mult i	6001FAOPT73	IVAC TIVA & TCI	DE	1000PB00609
IVAC P6000	Mult i	6001FAOPT74	IVAC TIVA & TCI	IT	1000PB00611
IVAC P6000	Mult i	6001FAOPT75	IVAC TIVA & TCI	NL	1000PB00612
IVAC P7000	EN	1000DF00136	IVAC TIVA & TCI	ES	1000PB00613
IVAC P7000	DE	1000DF00143	IVAC TIVA & TCI	PT	1000PB00614
IVAC P7000	FR	1000DF00144	IVAC TIVA & TCI	DK	1000PB00615
IVAC P7000	NL	1000DF00145	IVAC TIVA & TCI	FI	1000PB00616
IVAC P7000	ES	1000DF00146	IVAC TIVA & TCI	NO	1000PB00617
IVAC P7000	SW	1000DF00148	IVAC TIVA & TCI	SE	1000PB00618
IVAC P7000	NO	1000DF00149			