

HOPITAL  
PRENOM NOM  
ADRESSE 1  
ADRESSE 2  
CODE POSTAL VILLE

Rungis, le 4 décembre 2003

**Objet** : Rappel des références **13262, 13268, 13271, 13273** de tubulures pour pompes GEMSTAR™

Madame, Monsieur,

Le 11 avril 2003, vous avez reçu un courrier rappelant les conditions d'utilisation des tubulures de référence **13262, 13268, 13271, et 13273**, vous informant des évolutions de nos tubulures et de nos pompes de la gamme GEMSTAR™. Des nouvelles références de tubulures (**12640 et 13716** remplaçant les **13262** et les **13273**) sont désormais disponibles depuis le mois d'août dernier.

Suite à 3 incidents de matériovigilance récents, d'origine identique aux incidents décrits dans la communication du 11 avril 2003, et mettant en cause des tubulures d'ancienne génération, nous vous informons, en accord avec l'AFSSAPS, du rappel des anciennes références.

Nous vous demandons de bien vérifier dans vos différents services ainsi qu'à la pharmacie de votre établissement, qu'il ne reste plus en stock de références de tubulures GEMSTAR™ citées en objet. Nous vous remercions de bien vouloir nous les retourner le plus rapidement possible le cas échéant.

En complément de la valve anti-siphon inamovible présente sur toutes les nouvelles références, la tubulure **12640** a été redessinée : la voie principale de la partie en Y (branche comportant la valve anti-siphon) se distingue de la voie secondaire par sa grande longueur. Les nouvelles tubulures sont également équipées d'une cassette de finition différente contribuant à améliorer la qualité et la sécurité d'utilisation avec les pompes GEMSTAR™ possédant la dernière version logicielle 4.5.

Les tubulures sont à renvoyer à : **Abbott Industries**  
B.P. 3  
28380 Saint Rémy sur Avre

Pour l'échange, contacter notre service clientèle au Tel : 01.45.60.26.36 / Fax : 01.46.86.67.03  
Pour toute question complémentaire, veuillez joindre le service de matériovigilance au 01.45.60.27.13.

Nous vous remercions de la confiance que vous apportez aux produits Abbott en regrettant ce désagrément. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Paul-Louis Gayrel  
Pharmacien Responsable

Dr François Boer  
Responsable des Opérations  
Etudes Cliniques & Pharmacovigilance