

Saint-Denis, le 05/02/2018

Application de la décision du 21/11/2016 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées à certains équipements GEHC IGS

GEHC nous informe que suite à des modifications introduites en production, les modalités de contrôle des dispositifs GEHC IGS sont désormais différentes pour les nouvelles unités produites. Ces unités sont équipées d'un Mode Contrôle Qualité (QC) utilisateur qui est à utiliser pour mettre en œuvre les opérations de contrôle de qualité. Ce mode est accessible depuis la console système au moyen d'un icône en forme de « couteau Suisse ». Il convient ensuite de cliquer sur le bouton Quality Assessment (Évaluation de la qualité) dans la zone de navigation puis de cliquer sur « Enable QC Mode » (Activer le mode QC). Enfin, il est à noter que ce mode est décrit dans le manuel utilisateur ou dans un addendum à ce dernier.