

A l'attention des  
Directeurs des Etablissements de Santé,  
Responsables de Laboratoires,  
Correspondants locaux de réactovigilance

Marcy l'Etoile, le XXXX

**IMPORTANT  
INFORMATION PRODUIT**

**VITEK 2**

**Cartes AST-N051  
réf. 22126**

**Lots n° 291040910 (péremption 27 janvier 2008)  
N° 291043310 (péremption 20 février 2008)  
N° 291046810 (péremption 26 mars 2008)  
N° 291050040 (péremption 27 avril 2008)**

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateurs des cartes antibiogramme urinaire AST-N051, référence 22126 et nous vous en remercions.

Suite à une réclamation client, nous avons mis en évidence que le sticker mentionnant la limitation au niveau de l'interprétation des résultats de la fosfomycine n'avait pas été apposé sur les coffrets des lots :

**n° 291040910  
n° 291043310  
n° 291046810  
n° 291050040**

La limitation est la suivante : « **IMPORTANT : Les résultats de la fosfomycine ne sont interprétables que pour l'espèce *E.coli*** ».

Par conséquent, nous vous recommandons en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé :

- pour les lots précités de n'interpréter les résultats de la fosfomycine que pour l'espèce *E.coli* ; cette restriction sera toujours valable pour les prochains coffrets qui seront distribués avec le sticker mentionnant cette limitation ;
- si vous avez déjà utilisé des cartes de ces lots et rendus des résultats pour des espèces à Gram négatifs autres qu'*E.coli* et pour des prélèvements non urinaires, de revoir les résultats rendus sensibles à la fosfomycine et éventuellement de contacter vos prescripteurs.

Pour tout complément d'informations, vous pouvez contacter notre Service Clients au  
0 820 22 3000

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous excusons par avance des perturbations occasionnées au sein de votre laboratoire.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Service Clients

**IMPORTANT  
INFORMATION PRODUIT**

**VITEK 2**

**Cartes AST-N051  
réf. 22126**

**Lots n° 291040910 (péremption 27 janvier 2008)  
N° 291043310 (péremption 20 février 2008)  
N° 291046810 (péremption 26 mars 2008)  
N° 291050040 (péremption 27 avril 2008)**

**ACCUSE DE RECEPTION**

**A RETOURNER AU SERVICE CLIENT FRANCE, PAR FAX :**

**04 78 87 73 07**

**NOM DU LABORATOIRE : .....**

**CP - VILLE : .....**

**N° CLIENT:.....**

**NOUS AVONS RECU LE COURRIER D'INFORMATION LE : .....**

**DATE : .....**

**SIGNATURE : .....**