

# Courrier d'information utilisateurs

CIB 06.01

mars 2006

Courrier d'information transmis par les prestataires de service, à destination du personnel paramédical libéral intervenant à domicile chez des patients traités par une :

## **Pompe pour Perfusion Ambulatoire Série G 9000**

Faisant suite à plusieurs incidents sérieux et récurrents, survenus lors de l'utilisation de pompes pour perfusion ambulatoire – Série G 9000,

Et en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaires des Produits de santé,

Nous tenions à vous informer d'un **risque de perfusion par gravité** lorsque la cassette est incorrectement enclenchée ; ceci pouvant se produire dans les cas suivants :

- La cassette a été verrouillée en forçant, provoquant la cassure des ergots de la cassette,
- La pompe est démarrée alors que la cassette n'est pas verrouillée ; la pompe affichant « perfusion suspendue » alors que la perfusion s'écoule par gravité.

Nous soulignons l'importance à suivre les indications / avertissements précisés dans la notice d'utilisation au chapitre « Connexion de la cassette-réservoir à la pompe » et **nous vous demandons :**

- De ne pas utiliser une cassette endommagée,
- Surtout de ne pas lancer une perfusion, si la cassette n'est pas sécurisée,

Service Après-vente – Smiths Medical France

Tél. : 01 58 42 50 10 / Fax : 01 58 42 5015/ e-mail : morl.sav@smiths-medical.com

-----  
**Diffusion de l'information concernant les pompes G9000 de Smiths – Formulaire de suivi**

**A remettre à :**

*Cachet du prestataire de service*

Ref. patient (à remplir par le prestataire de service)	
Nom de l'intervenant à domicile :	
Qualité :	

Ai pris connaissance des informations de sécurité données dans ce courrier

Signature/Date:

\_\_\_\_\_