

A l'attention des
Responsables de laboratoire
Directeurs des Etablissements de Santé
Correspondants locaux de Réactovigilance

ATTENTION
RECOMMANDATION D'UTILISATION
Cartes VITEK 2 GN Réf.21341

Marcy l'Etoile, le 6 Septembre 2005

Madame, Monsieur

Soucieux de vous tenir informé des nouveaux développements concernant les souches atypiques, nous vous indiquons que nous avons récemment mis en évidence au Canada et aux Etats Unis deux erreurs d'identification de *Salmonella* O group B qui ont été identifiées Groupe *Serratia liquefaciens* avec la Carte VITEK 2 GN réf. 21341.

Nos investigations ont montré qu'il s'agissait de deux souches atypiques par rapport à l'historique de nos bases de données. Cette erreur d'identification potentielle peut entraîner un risque considéré comme faible de ne pas diagnostiquer une salmonellose. Les Salmonelloses durent généralement 3 à 7 jours et présentent un risque minime pour une population normale. Cependant, dans certains cas, un retard de diagnostic et/ou de traitement peuvent entraîner des complications sérieuses. Ceci concerne en particulier les patients atteints de SIDA, ceux présentant une déficience immunitaire, par exemple suite à une transplantation et les patients ayant une maladie lymphoproliférative ou une maladie granulomateuse chronique¹.

Afin d'éviter toute erreur d'identification de Salmonelle, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous recommandons de confirmer toute identification de Groupe *Serratia liquefaciens* par une autre méthode (ex. API 20 E).

Il est important de noter que la plupart des *Salmonelles* sont H₂S positives alors que la souche atypique *Salmonella* O group B est H₂S négative ; en conséquence, cette réaction ne peut pas être utilisée pour différencier *Salmonella* O group B du Groupe *Serratia liquefaciens*, ce dernier étant également H₂S négatif.

Nous avons pris en compte ces deux souches pour les ajouter à notre base de données afin de les intégrer dans les futures mises à jour des logiciels VITEK 2 et VITEK 2 Compact.

¹ Réf: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th Ed., 2005

Nous vous demandons de compléter et nous retourner rapidement l'accusé de réception ci-joint en ANNEXE A.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre Service Assistance Technique au **0 820 22 3000**.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Spécialiste Applications Bactériologie
bioMérieux France

ANNEXE A

**ATTENTION
INFORMATION IMPORTANTE**

Utilisateurs Cartes VITEK 2 GN Réf.21341

ACCUSE DE RECEPTION

A RETOURNER AU SERVICE CLIENT FRANCE, PAR FAX :

04 78 87 76 24

- **Raison sociale / tampon du laboratoire :**

- **N° client :**

- **Téléphone :**

-
-
-

• **Nous avons reçu le courrier d'information le :**

- **Signature :**

-**Date :**.....