

**MATIFAS****SARL MEDILINDUSTRY**

Sarl au capital de 500.000 €

RCS AMIENS : 498 897 313

626, rue de Rouen - 80.000 AMIENS

Tél : 03.22.33.52.52

Fax : 03.22.89.11.72

ETABLISSEMENT X

A l'attention du directeur d'établissement  
et du correspondant de matériovigilance

Amiens, le

**Par fax et par courrier****Objet : Avertissement de risque potentiel sur les barrières référence : GF830 - GF820 - GF752V3 - GF753V3**

Madame, Monsieur, cher client(e)

La SARL MEDILINDUSTRY, dont les coordonnées figurent en-tête du présent courrier, a repris, à compter du 1<sup>er</sup> juillet dernier, l'exploitation du fonds de commerce de la SAS MATIFAS, en redressement judiciaire.

Elle a été informée, par la SAS MATIFAS, de l'existence d'un risque de rupture de ses barrières de type V3, références : GF830 - GF820 - GF752V3 - GF753V3, sur lequel elle souhaite communiquer sans délai.

En effet, un taux de rupture de l'ordre de 4% a été constaté sur ce type de barrières, dotées de mâts en matériau composite : vous trouverez ci-joint une photographie du produit concerné et du point de rupture potentiel.

Les ruptures constatées seraient dues à des efforts trop importants au niveau du point de rotation des mâts en matériau composite. L'utilisation de produits de nettoyage à base d'éthanol favoriserait la rupture de cette pièce.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'une rupture peut entraîner la chute d'un patient.

Afin d'éviter tout accident de ce type, la SARL MEDILINDUSTRY vous demande d'adopter la démarche suivante, en accord avec l'AFSSAPS :

- 1) Procéder à une vérification systématique des barrières de lit afin d'écartier les barrières fragilisées.

- 2) Attirer l'attention de vos services sur ces risques potentiels de rupture afin de détecter les fissures avant qu'une rupture ne survienne;

La SARL MEDILINDUSTRY vous adressera, à ses frais, une barrière de remplacement en métal pour toute barrière de type V3 rompue ou fissurée dans les six mois à venir (c'est-à-dire jusqu'au 31/01/2008).

Par ailleurs, la SARL MEDILINDUSTRY vous proposera des conditions particulières pour le remplacement de votre parc de barrières de type V3 par des barrières métalliques.

Nous vous remercions d'adresser directement vos demandes à notre service après-vente, qui vous assistera dans ces démarches :

Monsieur Cosson  
Tél: 03.22.33.52.62  
Fax : 03.22.89.11.72

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette situation, et vous remercions de votre compréhension de cette action, qui vise à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher client(e), en l'assurance de nos salutations dévouées.

J.Clichy  
Directeur Qualité et services

# ANNEXE

**Objet : Avertissement de risque potentiel sur les barrières référence : GF 830-  
GF 820-GF752V3-GF753V3**

**Produit concerné : mâts en matériau composite**

**Référence : GFA 02487 (mât coté pied) et GFA 02488 –mât côté tête)**

**Localisation de la rupture ou des fissures :**

