


LIKO

URGENT : ACTION CORRECTIVE VOLONTAIRE D'ACCESSOIRES DE VERTICALISATEUR

Cher client,

Nous vous notifions par la présente que nous entreprenons actuellement une action corrective volontaire sur les étriers 350 pour verticalisateur SABINA II (accessoire référence 20270002) livrés entre le 31 août 2007 et le 17 octobre 2007. Cette action corrective, effectuée en accord avec l'AFSSAPS, a été motivée par un risque d'absence de vis de maintien des crochets d'attache de sangle. Cette absence peut entraîner le décrochage et, éventuellement, la chute du patient. Toutefois, aucun incident n'a actuellement été rapporté consécutivement à ce défaut d'assemblage.

En vertu du principe de précaution, nous vous demandons donc de vérifier la présence de ces deux vis sur le SABINA II n° (voir schéma ci-dessous, côté gauche et côté droit identiques, une vis de chaque côté soit deux vis par appareil).

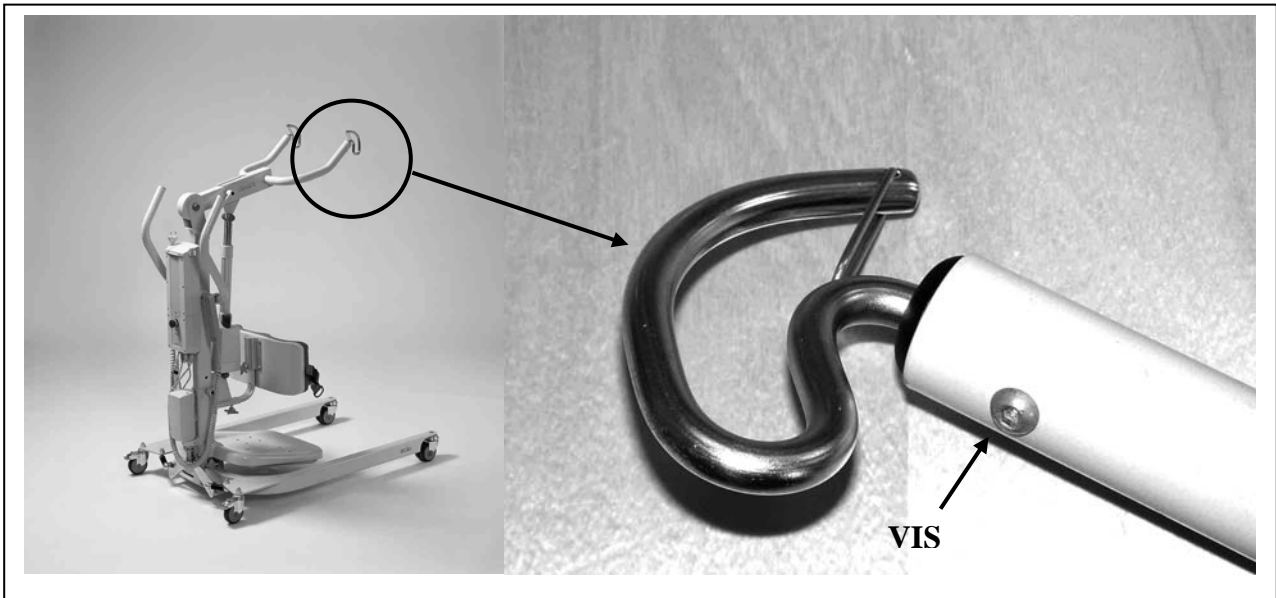

IMPORTANT : INSTRUCTIONS A SUIVRE

- Une fois cette vérification effectuée, nous vous demandons de nous retourner au plus vite le formulaire de vérification ci-joint dûment complété par fax au 03.83.22.95.10.
- **Les appareils ayant effectivement une ou plusieurs vis manquantes sont à mettre hors d'usage jusqu'à la correction du défaut.**
- Dès réception de ce formulaire, nous vous ferons parvenir le compte de vis nécessaires pour garantir la sécurité de vos appareils. Une attestation de modification sera à nous faire parvenir en retour par fax au 03.83.22.95.10

En cas de questions concernant ce rappel, vous pouvez nous contacter au 03.83.22.20.72.

Restant à votre disposition pour toute autre demande, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Alexandre CLAUDON,
Ingénieur Qualité

LIKO

URGENT : RAPPEL VOLONTAIRE DE VERTICALISATEURS

Formulaire de vérification

Merci de remplir ce questionnaire et de nous le retourner le plus rapidement possible par fax au 03.83.22.95.10

Personne remplissant le formulaire :

Etablissement :
NOM : Prénom :
Service : Tel :

1. Avez-vous lu et compris le courrier de rappel ci-joint ainsi que les instructions qu'il contient ?

OUI

NON

Si vous avez des questions concernant ce rappel, contactez-nous au 03.83.22.20.72

2. Après vérification, avez-vous des étriers concernés par ce rappel ?

OUI

NON

Si vous avez des étriers concernés par ce rappel, merci de les mentionner dans le tableau ci-dessous :

N° de série du lève-personne	Nombre de vis manquantes

Dès réception de ce formulaire, nous vous ferons parvenir les vis nécessaires à l'adresse suivante (à remplir) :

NOM : Prénom :
Service : Tel :
Adresse :

Date :

Nom et signature de la personne remplissant le formulaire :