

Nom Alain BORGHERO
Division Medical Solutions
Entité MED SERV.CLTS MAINTENANCE RD

Siemens S.A.S., MED SERV.CLTS MAINTENANCE RD,
9, boulevard Finot, 93527 Saint-Denis CEDEX 2

Téléphone 0820 80 75 69
email alain.borghero@siemens.com

**A l'attention du Directeur d'Etablissement et au
Correspondant Local de Matéριοvigilance**

Date 09 novembre 2006

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N°

Note importante de sécurité relative au système MODULARIS URO de marque SIEMENS Medical Solutions

Poste technique :

Cher(e) Client(e),

Nous attirons votre attention, en accord avec l'AFSSAPS, sur un éventuel problème de sécurité pour les patients et les utilisateurs de la table endourologie MODULARIS URO.

Suite à un incident survenu en Pologne, nous avons identifié un risque potentiel d'accident par les points de pincement situés sur les cotés longitudinaux de la table patient. Le risque intervient lorsque la table est bougée latéralement et que le patient ou l'utilisateur attrape les bords du panneau de table ou le dessous, comme le montre les photos ci-dessous (photos 1 & 2).



Figure 1



Figure 2

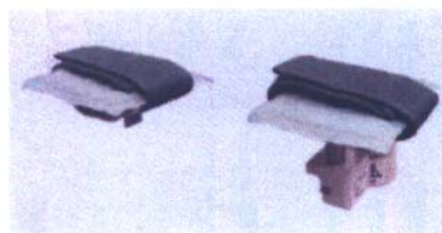


Figure 3

Siemens S.A.S.
Groupe : Medical Solutions

Adresse :
9, boulevard Finot
93527 Saint-Denis CEDEX 2

Tél. : +33 1 4922 3100
Fax : +33 1 4922 3413

Société par Actions Simplifiée au capital de 22.000.000 euros
9, boulevard Finot - 93527 Saint-Denis CEDEX 2
SIREN : 562 016 774 - Ident. T.V.A FR20 562 016 774; R.C.S. Bobigny B 562 016 774 - APE : 518L
N° CCP : 30041 00001 00469 80W020 35 - N° BNP Paribas : 30004 00828 00010414267 76

Lorsque la table est en mouvement, l'utilisateur doit s'assurer que les mains du patient soient correctement positionnées sur la surface de la table. Les mains du patient peuvent être mises le long du corps sur la table ou être posées sur les portes poignets afin d'éviter d'attraper les bords du panneau de table ou le dessous (photo 3).

Nous vous serions reconnaissants de vous conformer à cette note de sécurité et d'informer votre personnel. Veuillez vous assurer que cette note de sécurité est classée dans le chapitre sécurité du manuel d'utilisation de votre équipement. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre Centre d'Appels et d'Assistance Technique au 0820 80 75 69.

Nous vous remercions pour votre compréhension, et nous vous prions d'agréer, Cher(e) Client(e), nos respectueuses salutations.

Alain BORGHERO
Responsable Activité Radiologie

Christian BERT
Responsable Qualité