

**A l'attention des :**

- **Directeurs des Etablissements de Santé**
- **Correspondants locaux de réactovigilance**
  - **Responsables de laboratoires**

Les Mesnuls, le 14 décembre 2004

N/Réf. 135-04-ph

Cher utilisateur,

En accord avec l'AFSSAPS, nous portons à votre connaissance une anomalie portant sur notre kit HLA SSP OLERUP :

**Réf : 101.311-24u**

**Désignation : Kit DPB1 – 24 tests**

**N° de Lot : K04 et L67**

Lors du contrôle de qualité international UCLA pour l'échantillon DNA#407, le mélange d'amorces contenu dans le puits 48 ne permettait pas l'amplification de l'allèle DPB1\*8501. Cette anomalie a entraîné un résultat erroné de l'allèle DPB1\*2701.

Nous vous informons que cette amorce a été modifiée et amplifie correctement l'allèle DPB1\*8501 avec le lot M78 disponible depuis le 15 octobre 2004, ceci ayant été confirmé avec l'échantillon DNA#407.

Par conséquent, nous vous recommandons de tester les échantillons DPB1\*2701 préalablement sous-typés avec les lots K04 et L67 avec le nouveau lot M78.

Nous restons à votre écoute pour tout autre renseignement et vous prions de croire, cher utilisateur, en l'assurance de nos meilleurs sentiments.

La Direction

**PJ : Note Olerup SSP AB**