

**Objet : Platelia Aspergillus - Ref. 62797**

Chère Cliente, Cher Client,

Vous utilisez le kit Platelia Aspergillus, depuis plusieurs années pour beaucoup d'entre vous, et nous vous en remercions.

Quelques laboratoires nous ont récemment signalé avoir rencontré un nombre d'échantillons faux positifs répétables plus important qu'à l'habitude.

Nous avons pris en considération ces observations et demandé des échantillons pour effectuer des tests complémentaires.

Les contrôles réalisés sur tous les lots en cours de validité mettent en évidence des échantillons donnant des résultats très reproductibles quels que soient les lots testés et ne remettent pas en cause la qualité du kit.

Il nous semble important de rappeler que des résultats positifs répétables peuvent être associés à la précocité de détection de l'antigène galactomannane avant l'apparition des signes cliniques et/ou radiologiques lors d'une aspergillose invasive, et exceptionnellement, à la présence de galactomannane d'origine différente comme il a été décrit dans la littérature et qui fait l'objet d'investigations complémentaires.

A ce propos vous trouverez ci-joint la nouvelle notice rédigée pour le marquage CE .

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, nos respectueuses salutations.

Armèle BOURGEOIS  
Chef de Groupe Produits France

Brigitte CREPIN  
Chef de Gamme Mycologie