

A l'attention des  
Responsables de laboratoire,  
Directeurs des Etablissements de Santé,  
Correspondants de Réactovigilance

**Projet courrier**

Dardilly, le 16/08/2005

**IMPORTANT : INFORMATIONS PRODUITS**

<b>Référence</b>	<b>Lots</b>
TV5005I	915509
TV5006I	910260 911056 914034 916294
TV5010D	910265 917939
TV5002E	917012 914826

Madame, Monsieur,

Des utilisateurs nous ont signalé que certains tubes de milieux de culture suivants : Sélénite (TV5005I), Muller Kauffman (TV5006I), Bouillon Cœur Cerveille (TV5010D), Bouillon Tryptone Soja (TV5002E) présentaient des fuites et potentiellement des risques de contamination.

Les investigations menées par nos laboratoires de contrôle qualité ont conclu à la stérilité de ces milieux mais à des anomalies de fermeture de certains tubes (bouchons mal serrés). Des actions correctives ont été immédiatement mises en place.

L'utilisation de ces milieux n'est pas remise en cause. Cependant, en accord avec l'Afssaps, nous vous recommandons avant toute utilisation de placer les tubes des milieux Bouillon Cœur Cerveille et Tryptone Soja à l'étuve à 37°C, 24 heures, afin de vérifier leur stérilité. Nous vous recommandons également d'interpréter avec précaution les cultures obtenues pour tous les lots incriminés.

Conscient des inconvénients que cette situation peut engendrer, notre service Assistance Technique se tient à votre disposition pour tout complément d'information :

**Tél : 04 72 52 33 70**

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Service Clients