

A l'attention :  
- des médecins utilisateurs ;  
- des responsables de laboratoire ;  
- des correspondants locaux de réactovigilance ;  
- des directeurs des établissements de santé ;

Dectra

Strasbourg le 10 mai 2007

### Information Importante concernant

Le Test de Diagnostic rapide des Angines à streptocoque Beta Hémolytique du groupe A

#### **STREPTATEST®**

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur du Test de Diagnostic rapide des Angines à streptocoque Beta Hémolytique du groupe A dénommé STREPTATEST®.

En accord avec l'AFSSAPS, nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur le risque potentiel que représentent les réactifs d'extraction A et B en cas de mauvaise manipulation et en particulier en cas d'ingestion et/ou en cas d'inhalation.

Deux cas de méthémoglobinémies ont en effet été déclarés à un Centre Anti-poisons chez des enfants ayant ingéré du réactif d'extraction A contenant du Nitrite de sodium.

Par conséquent, nous vous recommandons dès à présent de :

- Reboucher les flacons A et B immédiatement après usage,
- Ne pas laisser les flacons A et B à la portée des patients
- Mettre en garde les utilisateurs des risques potentiels liés aux réactifs A et B.

Nous mettons dès à présent tout en œuvre pour :

- Modifier l'étiquetage des solutions d'extraction A et B
- Compléter la notice au niveau des précautions d'emploi
- Fournir systématiquement dans chaque boîte les fiches techniques de sécurité de l'acide acétique et du nitrite de sodium.

Ces fiches seront à conserver soigneusement, elles faciliteront le cas échéant l'action des services de secours en cas par exemple d'ingestion accidentelle ou volontaire.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire,

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

François-Xavier DENIMAL  
Docteur en Pharmacie.