

**INFORMATION  
IMPORTANTE  
PRODUIT**

«**NOM**»  
«**ADRESSE1**»  
«**ADRESSE2**»  
«**ADRESSE3**»  
«**CODE\_POSTAL**» «**VILLE**»

A l'attention «**DeDu**» «**PHARMACIEN**»

Maurepas, le 2 juillet 2007

**Objet : Systèmes de Dialyse Péritonéale Automatisée HomeChoice et HomeChoice PRO.**

Madame, Monsieur,

Baxter souhaite vous communiquer une information produit importante concernant une situation qui peut se produire lorsque l'alarme de drainage initial du système HomeChoice, appelée « VER DRAIN INI : XXXX ml », est réglée sur « non » par les patients.

Cette situation déjà connue a été décrite dans une lettre d'information produit importante, en date du 22 juin 2004, que vous trouverez en pièce jointe au présent courrier.

Cette communication aborde également la conduite à tenir face à des erreurs système « 2240 » et « 2267 » et inclut la procédure de déconnexion d'urgence. Ces informations vous sont transmises sur le principe d'une action de suivi. Elles ne font suite à aucune nouvelle réclamation et figurent dans le Guide Patient mis à jour, fourni avec l'appareil lors des changements de version du logiciel de l'HomeChoice.

Vous trouverez ci-joint les pages du Guide Patient en rapport avec ces thèmes, afin que vous puissiez facilement diffuser l'information aux personnes concernées.

**Alarme du Volume de Drainage Initial ( ALRM.DR.INIT : XXXX ml ) :** Les instructions indiquées dans le Guide Patient pour corriger cette alarme, permettront d'éviter le risque d'un remplissage excessif lors des échanges suivants et de programmer correctement l'alarme correspondante de l'HomeChoice. Cette information a déjà fait l'objet d'un courrier en date du 22 juin 2004 (voir pièce jointe).

**Erreurs système 2240 et 2267 :** Le Guide Patient contient également l'information sur la conduite à tenir face à ces erreurs système destinées à alerter les patients si de l'air est détecté au niveau de la ligne de branchement à usage unique ou d'une des poches de solution. Ces erreurs peuvent être provoquées par des fuites au sein du système, sur les poches ou au niveau des raccordements. De telles fuites peuvent affecter l'étanchéité et la stérilité du système et peuvent être une source possible de contamination, pouvant conduire à une infection péritonéale, si la ligne de branchement à usage unique est réutilisée.

.../...



Une entrée d'air dans les tubulures lors d'une déconnexion incorrecte du patient peut déclencher ces alarmes. Si une Erreur Système 2240 ou 2267 se produit, les patients doivent suivre les instructions décrites dans le Guide Patient et notamment la « procédure de déconnexion d'urgence ».

**Procédure de déconnexion d'urgence :** La procédure, fournie dans le Guide Patient mis à jour, indique aux patients l'ensemble des étapes à suivre pour se déconnecter de l'HomeChoice en toute sécurité au cours du traitement.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir communiquer ces informations aux membres de votre personnel, aux patients à domicile, aux autres départements et aux autres établissements concernés, de la façon la plus appropriée.

Pour de plus amples informations, notre service technique est à votre disposition au 01 34 61 55 66.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Christian RENAUX,  
Pharmacien Responsable