

**A l'attention des clients utilisateurs**

*Merci de faire copie à :*

Directeurs d'établissements

Responsables de laboratoires

Correspondants de réactovigilance

**Objet :** information importante concernant la gélose au sang de mouton suivante :

Code produit	Nom produit
<b>63784</b>	<b>Columbia + sang de mouton 20 x 90mm</b>

Chère Cliente, Cher Client,

Vous êtes utilisateurs du produit référencé ci dessus et nous vous en remercions.

Nous avons été informés par notre fournisseur de sang de mouton d'une faible contamination possible de cette matière première par *Salmonella enterica* subsp. *arizonae* / *diarizonae* .

Bien que n'ayant jamais identifié ce germe lors des contrôles réalisés sur ce produit, il est possible que ce germe soit à l'origine de contaminations ponctuelles lors de son utilisation dans votre laboratoire.

Nous souhaitons donc, en accord avec l'AFSSAPS, vous rappeler les recommandations suivantes afin d'éviter que cette bactérie ne perturbe les analyses :

- Avant utilisation, visualiser les boîtes afin d'éliminer celles qui présentent une contamination.
- Lors d'ensemencement en série de plusieurs milieux, prendre les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination par transfert.
- En cas d'utilisation d'une seule gélose au sang et d'un contact direct entre le prélèvement et la gélose, nous vous conseillons d'ensemencer au préalable un autre milieu enrichi.
- En fonction du prélèvement et du contexte clinique, tenir compte pour interpréter le résultat d'une possible contamination exogène de la gélose au sang par *Salmonella enterica* subsp. *arizonae* / *diarizonae* dont l'habitat se situe au niveau des animaux à sang froid et de l'environnement et, si nécessaire, procéder à un nouvel examen.

Si vous êtes en présence d'une identification de *Salmonella* spp et que vous ne pouvez pas déterminer l'espèce et le sérotype de cette souche, nous vous recommandons de la transmettre à un Centre de Référence (l'identification exacte de cette souche est *Salmonella* subsp. *diarizonae* de formule 61 : - :1,5,7).

Nous vous remercions de nous tenir informés si cette bactérie est à l'origine de la contamination d'un de nos milieux.

Pour tout renseignement technique, vous pouvez contacter notre service

**Assistance Téléphonique Clients au n° tél. 01.47.95.60.91**

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette demande et vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'assurance de nos respectueuses salutations.

Sylvie CONFIDA

Directeur Qualité/Aff. Réglementaires et Cliniques.