

INFORMATION DE SECURITE

AKS FRANCE

Destinataires : Directeur des établissements revendeurs.

Madame, Monsieur,

Suite à un cas d'explosion du capot du bloc de batteries d'un lève-malade « Flyer » à cause d'une accumulation de gaz dans le capot, nous vous informons, en accord avec l'AFSSAPS, de la mise en œuvre de l'action corrective suivante :

Le capot sur le bloc batterie des « FLYER » dont le numéro de série apparaît sur la liste ci-jointe, doit être remplacé par un capot ventilé, dont la conception empêche l'accumulation de gaz.

Les capots en place présentent un risque d'éclatement

Afin de vous faire parvenir le matériel nécessaire, à cette modification, nous souhaiterions savoir si ces appareils sont toujours en service.

Cette opération, rentrant dans le cadre d'une action corrective de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir nous répondre dans les plus brefs délais, car nous devons tenir informée l'AFSSAPS de son état d'avancement.

Nous tenant à votre disposition pour de plus amples informations, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Alain PAQUIS
Tél : 04 67 71 75 93
Fax : 04 67 71 57 79

PJ : Liste des appareils à modifier et mode opératoire

CHANGEMENT DE CAPOT DU BLOC BATTERIE « FLYER »

MODE OPERATOIRE

- 1°) - Travailler hors tension secteur.*
- 2°) - Dévisser les vis du capot à changer.*
- 3°) - Enlever le capot.*
- 4°) - Mettre en place le capot ventilé.*
- 5°) - Le fixer avec les vis.*
- 6°) - Eliminer le capot déposé, selon vos procédures*

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
233	24/02/2000	5335	13/10/1999	5601	11/02/2000
234	25/06/1999	5336	29/08/2000	5602	28/01/2000
235	25/06/1999	5337	29/08/2000	5603	05/12/2000
236	02/05/2000	5338	14/09/2000	5604	11/10/2000
236	23/06/2000	5339	18/10/2000	5605	11/10/2000
237	30/03/1999	5340	24/02/1999	5606	29/03/2000
251	04/05/1999	5341	02/08/2000	5607	29/03/2000
262	10/02/2000	5342	02/08/2000	5608	06/04/1999
263	14/04/2000	5343	02/08/2000	5609	06/04/1999
264	06/06/2000	5344	26/12/2000	5610	10/05/1999
265	17/11/2000	5345	26/12/2000	5611	25/06/1999
5185	16/11/2000	5346	26/12/2000	5612	04/11/1999
5186	23/01/2001	5347	30/12/1998	5613	31/01/2000
5187	25/01/2001	5348	09/02/1999	5614	10/04/2000
5188	30/12/1998	5349	11/03/1999	5615	17/07/2000
5189	10/12/1999	5434	11/03/1999	5616	19/07/2000
5190	15/12/2000	5435	30/03/1999	5617	02/08/2000
5191	29/01/1999	5436	21/05/1999	5618	28/08/2000
5194	29/01/1999	5437	03/05/1999	5619	13/07/1999
5195	03/01/2000	5438	25/06/1999	5620	02/08/2000
5196	05/05/1999	5439	02/07/1999	5621	02/08/2000
5197	28/02/2000	5440	23/07/1999	5622	02/08/2000
5198	08/02/2000	5441	22/01/2001	5683	22/06/2000
5199	08/02/2000	5442	04/05/2000	5684	02/07/1999
5205	24/11/2000	5443	12/09/2000	5685	29/11/2000
5206	28/09/2000	5479	25/10/2000	5686	29/11/2000
5207	06/01/2000	5480	22/12/2000	5687	24/11/1999
5208	05/10/2000	5481	22/12/2000	5688	28/04/2000
5210	18/07/2000	5482	22/12/2000	5689	07/03/2000
5211	30/12/1998	5483	22/12/2000	5690	23/05/2000
5212	30/12/1998	5484	25/06/1999	5691	27/05/1999
5215	03/07/2000	5485	22/07/1999	5692	07/06/2000
5216	28/04/2000	5486	21/11/2000	5693	30/10/2000
5217	21/12/2000	5487	30/12/1998	5694	12/07/2000
5218	17/01/2001	5488	04/08/2000	5695	27/09/2000
5219	18/12/2000	5489	12/09/2000	5696	19/10/2000
5222	28/01/1999	5490	27/09/2000	5697	04/12/2000
5223	15/03/1999	5491	14/10/1999	5698	20/09/1999
5224	03/11/1999	5492	30/03/2000	5699	22/12/2000
5225	03/11/1999	5493	02/05/2000	5700	16/03/1999
5226	12/01/1999	5593	02/05/2000	5701	28/01/1999
5228	07/07/1999	5594	02/05/2000	5702	28/01/1999
5229	30/08/1999	5595	08/09/2000	5703	02/04/1999
5330	30/08/1999	5596	19/04/2000	5704	02/04/1999
5331	13/10/1999	5597	07/04/2000	5705	25/06/1999
5332	13/10/1999	5598	06/06/2000	5706	24/03/1999
5333	13/10/1999	5599	28/01/1999	5707	24/09/1999
5334	13/10/1999	5600	28/01/1999	5708	22/10/1999

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER
(suite1)**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
5709	14/10/1999	5892	13/12/1999	6116	12/02/1999
5710	13/10/1999	5893	20/07/2000	6117	17/03/1999
5711	20/08/1999	5894	20/07/2000	6118	17/03/1999
5712	20/08/1999	5895	20/07/2000	6119	01/04/1999
5818	17/08/1999	5896	20/07/2000	6120	01/04/1999
5819	17/08/1999	5897	12/07/2000	6121	06/05/1999
5820	28/09/1999	5898	20/07/2000	6122	06/05/1999
5821	03/04/2000	5899	27/09/2000	6123	25/06/1999
5822	22/03/2000	5900	27/09/2000	6124	25/06/1999
5823	30/12/1998	5901	27/09/2000	6125	08/06/2000
5824	15/12/2000	5902	05/07/1999	6126	08/06/2000
5825	15/12/2000	5903	05/07/1999	6127	22/06/2000
5826	16/08/1999	5904	05/07/1999	6128	04/08/2000
5827	16/08/1999	5905	05/07/1999	6129	04/08/2000
5832	07/06/2000	5906	18/08/1999	6130	16/08/2000
5833	07/06/2000	5907	18/08/1999	6131	16/08/2000
5834	05/06/2000	5972	18/08/1999	6132	04/10/2000
5835	28/06/2000	5973	17/05/2000	6133	19/04/1999
5836	28/06/2000	5974	17/05/2000	6134	03/05/1999
5837	11/07/2000	5975	17/05/2000	6135	28/01/1999
5838	11/07/2000	5976	06/06/2000	6136	28/01/1999
5839	16/11/2000	5977	06/06/2000	6137	30/12/1998
5840	16/11/2000	5978	06/06/2000	6138	20/10/1999
5841	08/02/2000	5979	06/06/2000	6139	20/10/1999
5843	28/03/2000	5980	03/07/2000	6140	13/10/1999
5844	06/07/1999	5981	03/07/2000	6141	13/10/1999
5845	25/08/1999	5982	22/06/2000	6142	21/07/1999
5846	26/01/2000	5983	22/06/2000	6143	21/07/1999
5847	25/01/2000	5984	22/06/2000	6203	27/08/1999
5848	04/05/2000	5985	03/07/2000	6204	08/11/1999
5849	04/05/1999	5986	24/07/2000	6205	04/04/2000
5850	04/05/1999	5987	24/07/2000	6206	04/04/2000
5851	02/08/2000	5988	24/07/2000	6207	12/05/2000
5852	02/08/2000	5989	24/07/2000	6208	30/06/2000
5873	20/12/2000	5990	24/07/2000	6209	16/05/2000
5874	22/02/1999	5991	28/09/1999	6210	30/05/2000
5875	22/02/1999	5992	28/09/1999	6211	30/05/2000
5876	28/09/1999	5993	11/05/2000	6212	22/06/2000
5877	28/09/1999	5994	18/05/2000	6227	30/06/2000
5878	28/09/1999	5995	18/05/2000	6228	22/06/2000
5879	28/09/1999	5996	31/05/2000	6229	18/10/2000
5880	13/10/1999	5997	30/05/2000	6230	23/05/2000
5881	13/10/1999	5998	08/06/2000	6231	11/10/2000
5882	13/10/1999	5999	08/06/2000	6232	11/10/2000
5888	13/10/1999	6000	06/06/2000	6233	11/10/2000
5889	13/12/1999	6001	29/08/2000	6234	22/01/2001
5890	13/12/1999	6114	20/12/2000	6235	17/08/1999
5891	13/12/1999	6115	11/02/2000	6236	07/02/2000

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER
(suite2)**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
6237	02/01/2001	6410	18/10/2000	6552	03/11/2000
6238	28/01/1999	6411	08/11/1999	6553	03/11/2000
6239	09/02/1999	6412	08/11/1999	6554	23/05/2000
6240	13/09/2000	6413	06/06/2000	6555	11/03/1999
6241	13/09/2000	6414	06/06/2000	6607	17/09/1999
6242	13/09/2000	6415	29/06/2000	6608	18/10/1999
6243	12/10/2001	6416	29/06/2000	6609	18/10/1999
6244	07/12/2000	6417	12/07/2000	6610	04/11/1999
6245	11/09/2000	6418	12/07/2000	6611	04/11/1999
6246	12/09/2000	6419	19/04/1999	6612	16/05/2000
6324	18/02/2000	6420	19/04/1999	6613	13/11/2000
6325	15/05/2000	6421	17/08/2000	6614	02/11/2000
6326	21/10/1999	6422	17/08/2000	6615	30/11/2000
6327	25/06/1999	6423	22/08/2000	6616	09/01/2001
6328	25/06/1999	6424	11/03/1999	6617	05/04/2000
6329	09/08/1999	6425	02/05/2000	6618	27/04/2000
6330	08/11/1999	6426	09/06/2000	6619	09/05/2000
6331	15/12/1999	6427	23/06/2000	6620	05/12/2000
6332	15/12/1999	6428	14/09/2000	6621	21/11/2000
6333	14/04/2000	6429	18/10/2000	6622	21/11/2000
6334	02/03/2000	6430	15/12/2000	6623	20/11/2000
6335	07/03/2000	6431	22/03/2000	6624	20/11/2000
6336	12/11/1999	6494	04/05/1999	6625	18/10/2000
6337	04/09/2000	6495	27/08/1999	6626	21/12/2000
6338	23/01/2001	6496	02/06/1999	6628	14/12/1999
6339	24/11/2000	6497	10/11/1999	6629	09/08/1999
6340	19/12/2000	6498	09/02/1999	6630	09/08/1999
6341	16/11/2000	6499	11/09/2000	6631	22/07/1999
6347	08/12/1999	6500	04/05/1999	6632	22/07/1999
6348	23/06/2001	6501	02/07/1999	6633	22/07/1999
6349	18/12/2000	6502	31/01/2000	6634	23/12/1999
6350	18/12/2000	6503	16/11/2000	6635	23/12/1999
6351	11/03/1999	6536	18/12/2000	6636	02/03/2000
6352	30/06/2000	6537	17/01/2001	6637	02/03/2000
6353	30/06/2000	6538	12/07/2000	6719	27/09/2000
6354	27/07/2000	6539	12/07/2000	6720	27/09/2000
6355	07/08/2000	6540	20/07/2000	6721	31/10/2000
6356	07/08/2000	6541	15/05/2000	6722	31/10/2000
6357	19/04/1999	6542	26/06/2000	6723	18/10/2000
6358	06/09/2000	6543	25/02/2000	6724	18/10/2000
6402	29/09/2000	6544	13/03/2000	6725	31/10/2000
6403	29/09/2000	6545	27/09/2000	6726	05/12/2000
6404	24/01/2000	6546	30/08/2000	6727	05/12/2000
6405	22/02/1999	6547	24/10/2000	6728	05/12/2000
6406	05/03/1999	6548	24/10/2000	6748	09/07/1999
6407	17/07/2000	6549	20/10/2000	6749	09/02/1999
6408	17/07/2000	6550	13/03/2000	6750	23/10/2000
6409	18/10/2000	6551	04/10/2000	6751	23/10/2000

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER
(suite3)**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
6752	24/10/2000	7006	20/09/2001	7118	14/04/1999
6753	06/12/2000	7007	02/03/2000	7119	09/02/1999
6754	23/10/2001	7008	02/03/2000	7120	28/06/1999
6755	05/01/2001	7009	08/09/2000	7121	13/07/1999
6756	29/06/2000	7010	12/07/2000	7122	13/07/1999
6757	03/01/2000	7011	04/12/2000	7123	13/07/1999
6758	03/01/2000	7012	15/12/2000	7124	13/07/1999
6759	13/10/1999	7013	24/02/1999	7125	13/07/1999
6760	13/10/1999	7024	30/03/1999	7126	21/07/1999
6761	01/12/1999	7025	30/03/1999	7127	27/12/1999
6762	04/07/2000	7026	30/03/1999	7171	05/04/2000
6763	04/11/1999	7027	30/03/1999	7172	25/04/2000
6764	30/05/2000	7028	30/03/1999	7173	25/04/2000
6765	22/01/2001	7029	30/03/1999	7174	24/05/2000
6766	03/10/2000	7030	30/03/1999	7175	31/05/2000
6767	16/11/2000	7031	11/03/1999	7176	31/05/2000
6858	16/11/2000	7032	08/02/2000	7177	03/10/2000
6859	04/12/2000	7033	15/03/1999	7178	27/09/2000
6860	23/06/2000	7034	15/03/1999	7179	03/10/2000
6861	09/08/2000	7035	15/03/1999	7180	27/09/2000
6862	09/08/2000	7036	03/05/1999	7181	27/09/2000
6863	27/10/2000	7037	03/05/1999	7182	11/10/2000
6864	08/11/2000	7038	03/05/1999	7183	11/10/2000
6865	02/06/2000	7039	23/07/1999	7184	09/10/2000
6866	19/02/1999	7040	23/07/1999	7185	11/10/2000
6867	16/12/1999	7041	31/08/1999	7186	03/10/2000
6868	29/12/1999	7042	31/08/1999	7187	11/10/2000
6869	12/09/2000	7043	09/08/1999	7188	09/10/2000
6870	12/09/2000	7078	31/08/1999	7189	09/02/1999
6871	30/12/1998	7079	21/12/1999	7190	02/05/2000
6872	30/12/1998	7080	21/12/1999	7191	09/08/1999
6873	30/12/1998	7081	21/12/1999	7192	09/08/1999
6874	27/08/1999	7082	21/12/1999	7193	17/01/2000
6875	27/10/2000	7083	14/02/2000	7194	28/06/2000
6876	18/10/2000	7084	14/02/2000	7195	19/12/2000
6877	09/01/2001	7085	14/02/2000	7196	14/09/1999
6879	30/10/2000	7086	16/05/2000	7197	05/06/2000
6880	17/05/1999	7087	16/05/2000	7198	21/07/1999
6881	07/12/2000	7098	16/05/2000	7199	05/08/1999
6882	09/08/1999	7099	11/02/1999	7200	13/10/1999
6883	21/10/1999	7100	11/02/1999	7206	09/11/1999
6884	09/12/1999	7101	14/06/1999	7207	03/11/1999
6885	19/05/2000	7102	14/06/1999	7208	01/12/1999
6886	18/07/2000	7103	09/08/2000	7241	01/12/1999
6887	06/07/1999	7104	09/08/2000	7242	01/12/1999
6888	24/02/2000	7105	10/08/2000	7243	07/08/2000
7004	25/10/2000	7106	09/02/1999	7244	09/10/2000
7005	20/10/2000	7107	14/04/1999	7245	09/10/2000

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER
(suite4)**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
7246	08/12/2000	7377	04/11/1999	7589	28/04/2000
7247	08/12/2000	7378	24/01/2001	7590	28/04/2000
7248	02/01/2001	7379	24/01/2001	7591	28/04/2000
7249	08/12/2000	7380	28/01/1999	7592	28/04/2000
7250	20/05/1999	7381	28/01/1999	7593	28/04/2000
7251	20/05/1999	7382	28/01/1999	7594	28/04/2000
7252	20/05/1999	7383	17/02/1999	7595	28/04/2000
7253	31/03/2000	7461	30/03/1999	7596	27/09/2000
7254	18/10/2000	7462	30/03/1999	7597	27/09/2000
7255	26/05/1999	7463	30/03/1999	7598	27/09/2000
7256	11/10/2000	7464	13/04/1999	7599	27/09/2000
7257	04/10/1999	7465	13/04/1999	7600	27/09/2000
7258	04/10/1999	7466	13/04/1999	7601	19/01/2000
7259	04/10/1999	7467	05/05/1999	7602	28/01/2000
7260	31/08/1999	7468	05/05/1999	7603	28/01/2000
7261	31/08/1999	7469	05/05/1999	7604	28/01/2000
7262	15/09/1999	7470	26/05/1999	7605	03/02/2000
7263	15/09/1999	7471	26/05/1999	7606	02/03/2000
7264	15/09/1999	7472	26/05/1999	7607	09/03/2000
7265	16/08/2000	7473	29/06/1999	7608	02/03/2000
7266	16/08/2000	7474	29/06/1999	7609	09/03/2000
7267	23/11/2000	7475	29/06/1999	7610	14/04/2000
7268	30/05/2000	7476	25/06/1999	7611	14/04/2000
7269	30/05/2000	7477	25/06/1999	7612	14/04/2000
7270	30/05/2000	7478	25/06/1999	7613	14/04/2000
7350	30/05/2000	7479	25/06/1999	7614	14/04/2000
7351	27/09/2000	7480	21/07/1999	7615	14/04/2000
7352	16/11/2000	7481	21/07/1999	7616	14/04/2000
7353	07/11/2000	7482	15/09/1999	7617	19/05/2000
7354	25/01/2001	7483	15/09/1999	7622	19/05/2000
7355	10/05/2000	7484	15/09/1999	7623	19/05/2000
7356	30/03/2000	7485	19/10/1999	7624	08/06/2000
7357	01/03/1999	7486	19/10/1999	7625	08/06/2000
7358	02/11/2000	7487	19/10/1999	7626	22/06/2000
7359	17/01/2001	7488	13/10/1999	7627	22/06/2000
7364	21/11/2000	7489	13/10/1999	7691	22/06/2000
7365	15/12/2000	7490	13/10/1999	7692	22/06/2000
7366	25/06/1999	7572	12/11/1999	7693	22/06/2000
7367	28/01/1999	7573	12/11/1999	7694	22/06/2000
7368	18/02/1999	7574	12/11/1999	7695	20/09/2000
7369	12/01/1999	7575	02/12/1999	7696	28/08/2000
7370	15/07/1999	7576	02/12/1999	7697	28/08/2000
7371	15/09/1999	7577	02/12/1999	7698	28/08/2000
7372	12/11/1999	7578	17/02/2000	7699	06/09/2000
7373	26/02/1999	7579	17/02/2000	7700	06/09/2000
7374	28/01/1999	7580	17/02/2000	7701	06/09/2000
7375	19/01/2000	7581	17/03/2000	7702	06/09/2000
7376	04/11/1999	7588	17/03/2000	7703	26/10/2000

**LISTE DES
APPAREILS
A MODIFIER
(suite5 et fin)**

Numero	Date de vente	Numero	Date de vente	Numero	Date de vente
7704	19/10/2000	7835	02/01/2001	8000	30/03/1999
7705	19/10/2000	7836	02/01/2001	8006	30/03/1999
7706	19/10/2000	7837	09/02/1999	8007	19/05/1999
7707	26/10/2000	7838	09/02/1999	8008	09/11/1999
7708	26/10/2000	7839	27/11/2000	8009	19/11/1999
7709	21/11/2000	7840	03/12/1999	8010	04/11/1999
7710	21/11/2000	7841	29/01/2001	8011	14/12/1999
7711	21/11/2000	7842	19/12/2000	8012	02/12/1999
7712	19/12/2000	7843	19/12/2000	8013	13/01/2000
7713	19/12/2000	7848	05/11/1999	8014	04/11/1999
7714	18/12/2000	7849	10/11/1999	8015	06/09/2000
7715	18/12/2000	7850	22/02/2000	8021	05/10/2000
7716	18/12/2000	7851	03/02/2000	8022	27/09/2000
7717	19/12/2000	7852	03/02/2000	8023	16/11/2000
7718	18/01/2001	7853	10/02/2000	8024	04/01/2001
7719	17/01/2001	7854	22/02/2000	8025	15/12/2000
7720	17/01/2001	7855	10/02/2000	8026	18/12/2000
7721	17/01/2001	7856	10/02/2000	8027	30/12/1998
7722	18/01/2001	7857	12/07/2000	8028	24/03/1999
7723	18/01/2001	7858	30/12/1999	8029	24/03/1999
7724	22/12/1999	7859	06/11/2000	8030	22/09/1999
7725	29/09/1999	7860	07/04/2000	8087	06/01/2000
7726	14/02/2000	7861	30/05/2000	8088	23/01/2001
7727	03/03/1999	7862	16/11/2000	8089	12/01/1999
7728	11/03/1999	7863	16/11/2000	8090	12/07/2000
7729	11/03/1999	7864	23/10/2000	8091	12/07/2000
7730	11/03/1999	7865	23/10/2000	8092	02/08/2000
7777	11/03/1999	7866	12/01/1999	8093	02/08/2000
7778	25/06/1999	7867	19/12/2000	8094	19/10/2000
7779	25/06/1999	7935	16/11/2000	8095	23/12/1999
7780	25/06/1999	7936	07/07/1999	8096	28/01/1999
7781	25/06/1999	7937	06/05/1999	8097	27/09/1999
7782	25/06/1999	7938	11/05/2000	8098	01/09/2000
7783	14/09/1999	7939	11/05/2000	8099	13/12/2000
7784	26/10/1999	7986	13/12/1999	8100	25/06/1999
7785	14/09/1999	7987	13/12/1999	8101	18/01/2000
7786	14/09/1999	7988	07/02/2000	8102	11/05/2000
7797	14/09/1999	7989	30/05/2000	8103	22/06/2000
7798	14/09/1999	7990	14/04/1999	8104	20/09/1999
7799	09/11/1999	7991	02/12/1999	8105	15/09/1999
7800	03/11/1999	7992	14/04/2000	8106	18/12/2000
7801	03/11/1999	7993	02/06/2000	Case vide	
7802	14/12/1999	7994	12/10/2000	Case vide	
7803	14/12/1999	7995	27/09/2000	Case vide	
7804	14/12/1999	7996	12/07/2000	Case vide	
7805	14/12/1999	7997	10/08/2000	Case vide	
7806	14/12/1999	7998	11/02/1999	Case vide	
7834	02/01/2001	7999	11/03/1999	Case vide	