

Dardilly, le 21 Décembre 2006

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Disques pour antibiogramme
CT0449B Ticarcilline / Acide clavulanique**

Madame, Monsieur,

Des investigations techniques ont montré une instabilité potentielle de la charge en Ticarcilline/ acide clavulanique Réf. CT0449B une fois que la cartouche est sortie de son emballage.

Une utilisation continue après un jour d'ouverture peut donc entraîner une fausse résistance à la Ticarcilline/acide clavulanique. Si nécessaire, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer les résultats précédemment rendus avec cet antibiotique en cohérence avec les résultats des autres antibiotiques.

A titre transitoire, il est recommandé de changer de cartouche chaque jour.

L'étiquetage et la notice technique des prochains lots disponibles seront mis à jour avec ces informations.

Ceci est une mesure temporaire. Nous travaillons actuellement sur le produit afin de retrouver la stabilité initiale. Nous vous informerons dès un retour à la normale.

Notre service technique est à votre disposition pour toute demande au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits