

Marseille, le 1er février 2005


A L'attention du Service :
BIOMEDICAL
ENDOSCOPIE & BLOC OPERATOIRE
HYGIENE

Objet : Information aux utilisateurs du Soluscope 3

Ref : MAT06012005

Madame, Monsieur,

Nous avons constaté qu'après une utilisation intensive dans le Soluscope 3, la connectique WO-AW140 utilisée avec les endoscopes Olympus série 140 & 145 (voir photo ci-dessous) pouvait présenter une légère fuite au niveau du connecteur Air/Eau ou du connecteur Air. Cette fuite peut, dans certaine condition, entraîner la non détection d'un bouchage du canal air ou eau.

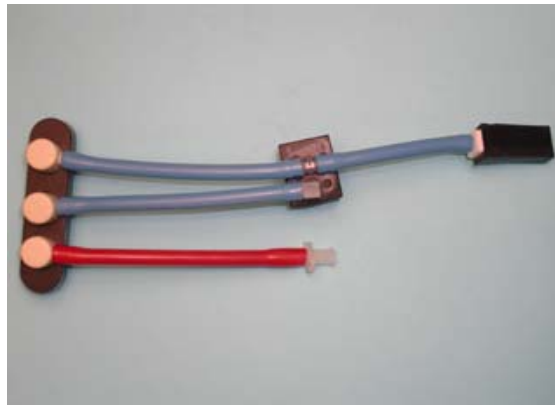

Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de ce courrier en indiquant les numéros de série des Soluscope 3 que vous utilisez, le nombre de connectiques WO-AW140 que vous détenez, vos coordonnées, et en faxant ce document au 04 91 83 02 99.

Ces données nous permettront de vous faire parvenir un kit de modification de cette connectique

Restant à votre écoute.

L'équipe Q.C.M.

REPONSE Ref : MAT06012005

Questionnaire à retourner par fax au 04 91 83 02 96

Etablissement :
.....
.....

Nombre de Soluscope 3 utilisé (s) :

N° de série de ces Soluscope :

Nombre de connectique WO-AW140 à modifier :.....

Je soussigné M., en qualité de,
certifie avoir pris connaissance de la présente information et vous demande de bien vouloir
me faire parvenir un kit pour mise à jour.

Fait à le.....

Signature