



20 septembre 2018

Avis de sécurité terrain

Cher Distributeur,

Cet avis de sécurité terrain a été publié afin de clarifier les contre-indications supplémentaires à l'utilisation de la trousse de prélèvement sanguin au scalp fœtal (FBS-AC) de BridgeMaster Medical et des lancettes de prélèvement sanguin au scalp fœtal (FBS-W).

Le mode d'emploi mis à jour le 20 septembre 2018 comprend la modification des contre-indications comme suit:

Contre-indications

Le prélèvement de sang fœtal doit être évité et est contre-indiqué dans les situations suivantes:

- Placenta Prævia
- Infection maternelle (par exemple, VIH, virus de l'hépatite, virus de l'herpès simplex, infections associées à l'anémie)
- Incapacité à identifier la partie présentée du fœtus
- prématurité (naissance à moins de 34 semaines de gestation)
- Troubles de la coagulation fœtale (p. Ex. Hémophilie, anémie)
- Danger grave pour fœtus (p. Ex. Bradycardie fœtale prolongée > 3 minutes)

Les mises à jour des contre-indications d'utilisation ont été faites en référence aux contre-indications du RCOG pour les procédures de prélèvement sanguin au scalp fœtal.



Nous demandons à tous nos distributeurs des trousse et des lancettes de prélèvement sanguin d'informer leurs clients des modifications apportées aux contre-indications d'utilisation de ces produits.

Veuillez signer la confirmation de bonne réception de cet Avis de Sécurité Terrain et la bonne compréhension de la conduite à tenir pour y donner suite.

Cordialement

Zoé Neal

Directeur général

BridgeMaster Medical Limited

Nom distributeur : _____

Pays : _____

Date: _____