

ETABLISSEMENT  
**A L'ATTENTION DE ...**  
RUE  
«LieuditBP»CP VILLE

Roncq, le .....


Objet : Action de sécurité concernant les Lève-personnes Maxi Move avec système de verrouillage combi (T-BAR)-Société ARJO

Madame, Monsieur,

Suite à plusieurs incidents signalés hors France, dont certains ont entraîné la chute de patients, la société ARJO a constaté que dans certaines utilisations du lève-personnes Maxi Move Combi (lors de l'appui sur une surface rigide), un détachement entre la partie mobile et la partie fixe de la barre de potence T-Bar peut se produire. Seuls les appareils COMBI distribués avant le 7 avril 2008 sont concernés par cette information.

Nous vous informons, par ailleurs, que nous allons procéder à une modification du système de fixation de certains appareils afin d'améliorer la sécurité du dispositif. Les appareils concernés peuvent être identifiés selon leurs n° de série comme décrit ci-dessous.

Dans l'attente, la société ARJO en accord avec l'Afssaps souligne qu'il est **impératif** de veiller à informer et à rappeler aux personnels soignants la bonne utilisation du système de transfert Maxi Move : en effet, lors de tout type de transfert, l'agent hospitalier doit, avant et au début de la procédure de transfert, s'assurer du bon verrouillage de la barre de potence (T-BAR). Les rainures de la partie fixe et mobile doivent être correctement alignées (voir **Fig.1**)

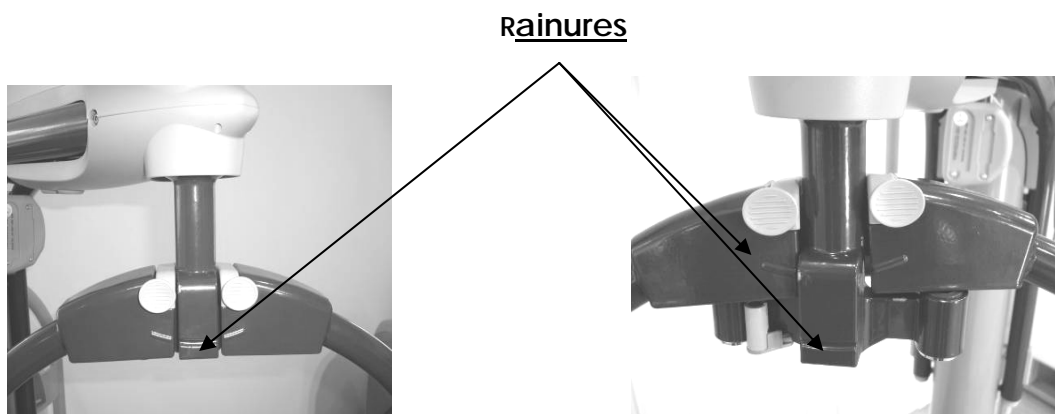

**CORRECT**

**INCORRECT**

**Fig.1**

Une nouvelle notice d'utilisation avec de nouvelles recommandations de maintenance des systèmes Combi (Page.3) vous sera également remise lors de l'intervention de notre technicien régional.

Nous sommes conscients du désagrément que cela engendre néanmoins, afin d'assurer au mieux la qualité de nos produits, le technicien régional pourra intervenir avant le 30/11/08 dans votre établissement.

Il procédera gratuitement au changement du système de verrouillage du berceau ou de la civière dès réception du coupon ci-joint dûment complété et renvoyé au fax et/ou adresse suivants :

03 20 28 13 64  
ARJO Equipements hospitaliers 45 ave de l'EUROPE BP 133 59436 RONCQ CEDEX

Pour tous compléments d'informations, vous pouvez appeler au **03 20 28 13 13**.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations.

Gérard CHARRIER  
Directeur Technique



**RETROFIT MAXI-MOVE COMBI**

Nom et adresse de l'établissement : .....

Type de l'appareil : .....

N° de série : .....


Localisation de l'appareil : .....

Nom et qualité de la personne à contacter : .....

N° de téléphone : .....


**Détails des appareils concernés :**

**A)** Tous les appareils combi équipés de T-Bar mis en service jusqu'à la semaine 32 de 2006 (4 Septembre) sont concernés et seront équipés d'un nouveau T-Bar.

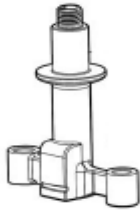

**T-BAR**

**B)** Tous les appareils maxi move combi équipés de T-Bar commercialisés entre la semaine 32 2006 (inclusive) et la semaine 14 de 2008 (4 avril) ; seuls les guides sur le T- Bar seront changés sur cette série.

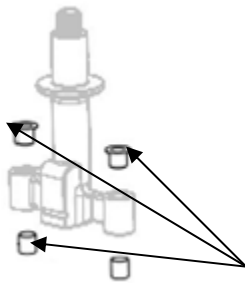

**Guide à changer**

**C)** Les appareils vendus à partir de la semaine 15 de 2008 (7 avril) ne font l'objet d'aucune modification

**IDENTIFICATION DES APPAREILS**

**A) CHANGEMENT T-bar**

N° de SERIE:  
GB 5105 xxxxx à GB 0106 xxxxx  
SEE 0547 xxx à SEE 0631 xxx

**B) CHANGEMENT DES GUIDES:**

N° de SERIE:  
SEE 0632 xxx à SEE 0814 xxx

**C) APPAREILS NON MODIFIES**

N° de SERIE:  
A partir de SEE 0815 xxx