

## AVIS RELATIF A LA SECURITÉ

### LEVE PERSONNE LIFTY 4 : RAPPEL DES CONSIGNES D'INSTALLATION / UTILISATION DE LA FIXATION MAT / TRAVERSE

*Cette information est destinée aux prestataires de santé à domicile mettant à disposition un lève personne Lifty 4 ou en charge de sa maintenance. Cette communication doit être transmise à tous les utilisateurs concernés afin qu'ils s'assurent du montage correct de la liaison mât/traverse de l'appareil.*

**Date : 29/05/2019**

**Réf. : FSN-190529-1FR**

Madame, Monsieur, cher Client,

Nous avons identifié un risque potentiel lié au non respect des consignes de sécurité lors de l'utilisation du soulève personne Lifty 4 lorsque le transfert du patient est réalisé sans que l'axe de fixation du mât soit verrouillé de manière sécurisée sur le piètement de l'appareil. Dans ce cas, le soulèvement du patient peut entraîner le repliage brutal de l'appareil pouvant concourir à une situation dangereuse pour le patient.

#### **Appareils concernés :**

Les appareils concernés par cette lettre d'information de sécurité sont les lève personnes référence **Lifty 4** dont les numéros de série sont compris entre **SN 12 000783** et **SN 18 000530**.

#### **Rappel des consignes de sécurité :**

Le verrouillage de l'axe de liaison mât/traverse du Lifty 4 doit être vérifié avant chaque utilisation.  
L'axe peut être verrouillé de 2 façons différentes en fonction des versions et du type d'utilisation :

A. Par un anneau




B. Par une goupille Bêta\*



\* Verrouillage avec goupille Bêta, version avant SN 1700340, pour utilisation avec pliages fréquents.

L'analyse montre que des évènements indésirables se sont produits lors d'utilisations de l'appareil sans que l'axe de liaison soit verrouillé par l'anneau ou la goupille (C).

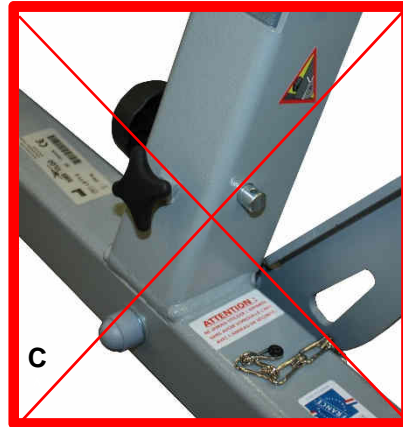



**Actions à entreprendre :**

Veillez diffuser le présent AVIS RELATIF A LA SECURITE à toutes les personnes concernées de votre établissement ainsi qu'aux emplacements où les appareils ont été transférés, pour qu'avant toute utilisation, mise en place/installation ou vérification périodique de l'appareil, un contrôle soit effectué afin de s'assurer que l'axe de liaison ait été **correctement mis en place et verrouillé à l'aide de l'anneau de sécurité (A)** (fourni sur tous les appareils) ou à l'aide de la goupille bêta (B) montée au 2<sup>ème</sup> cran, conformément au mode d'emploi et aux consignes de sécurité.


Pour une installation à long terme ne nécessitant pas un repliage fréquent de l'appareil, nous conseillons de toujours verrouiller l'axe avec l'anneau de sécurité (A), aucun signalement d'incident ne nous ayant été rapporté dans cette configuration.

Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent rester à la portée de tout utilisateur, (professionnel, soignant ou aidant). L'installateur doit s'assurer que l'utilisateur les a bien compris.

**RAPPEL IMPORTANT** : il est nécessaire d'effectuer un contrôle périodique du lève personne au moins une fois par an. **La présence et l'état du système de verrouillage** entre le mât et la traverse (**axe + molette, anneau de sécurité, chaînette fixée au châssis** référencés ci-dessous), doivent impérativement faire l'objet d'une vérification.

	<i>Axe Ø12x91 ZI (A001301) + molette de serrage femelle M10 (A702036)</i>
	<i>Anneau brisé (A001084)</i>
	<i>Chaînette (A001439)</i>

Dans le cas où elles ne seraient plus présentes sur les appareils, les étiquettes d'avertissement sont également disponibles auprès de nos services.

	<i>Etiquette sécurité pied (A501076)</i>
<b>ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR VERROUILLÉ L'AXE AVEC L'ANNEAU DE SECURITE</b>	<i>Etiquette sécurité verrouillage mat traverse (A501618)</i>

**Accusé de réception :**

Nous demandons à TOUS NOS CLIENTS de bien vouloir compléter le formulaire d'accusé de réception ci-joint dans son intégralité et de nous le retourner selon les instructions figurant sur celui-ci. Votre réponse est importante pour le suivi de l'efficacité de cette information de sécurité.

**Contacter le service clients :**

Pour toute question associée à cette information de sécurité vous pouvez nous contacter par téléphone au **05 53 74 45 50** ou par mail à l'adresse suivante : **qualite.vilgo@hms-vilgo.com**

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien continu, et nous adressons toutes nos excuses pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner dans votre organisation. Cet AVIS RELATIF A LA SECURITE mis en place par HMS-VILGO a été porté à la connaissance de l'ANSM et sera disponible sur son site.

**M. Arnaud CHAUVIN**  
Responsable Qualité



## AVIS RELATIF A LA SECURITÉ

### Lève personne LIFTY 4

---

## FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

---

Nous confirmons que :

- Nous avons reçu l'information de sécurité et compris les instructions fournies,
- Nous avons identifié le stock de Lifty 4 concernés,
- Nous avons appliqué ces consignes, le cas échéant informé les utilisateurs concernés.

Société :

Adresse :

Nom de la personne remplissant le formulaire :

Fonction :

E-mail :

Signature :

date :     /     /

**VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR FAX AU 05 53 63 06 07 OU LE SCANNER ET LE  
RENOYER PAR E-MAIL : [qualite.vilgo@hms-vilgo.com](mailto:qualite.vilgo@hms-vilgo.com)**