

Notification de sécurité

Système de numérisation de cliché radiologique PCR Eleva

Cher Client,

Philips Healthcare souhaite vous informer, en accord avec l'Afssaps, suite à un signalement de matériovigilance sans conséquence clinique, qu'une anomalie de fonctionnement a été détectée sur les systèmes de numérisation de cliché radiologique Philips PCR Eleva.

Lorsqu'un examen est sélectionné pour un patient et qu'une requête s'exécute en arrière plan, le système pourrait attribuer l'examen à un autre patient.

Les utilisateurs doivent donc s'assurer que le patient actif, apparaissant en surbrillance à l'écran, est celui à qui correspond l'examen affiché.

Le correctif logiciel de cette anomalie devrait être disponible fin février 2009 et sera donc installé progressivement sur tous les systèmes à compter du mois de mars, à titre gratuit. Un Responsable Technique Philips prendra contact avec vous afin de prévoir un rendez-vous pour ce qui concerne votre installation.

Nous vous prions de bien vouloir diffuser cette notification auprès de toutes les personnes concernées par les informations qu'elle contient et d'en joindre un exemplaire dans le manuel utilisateur de votre système.

Si vous avez des questions relatives à cette notification nous vous suggérons de contacter Jean-François Gambié, Responsable Matériovigilance, au 01.55.49.43.76 ou par courrier électronique jean-francois.gambie@philips.com.

Nous vous prions de croire, cher Client, en l'assurance de notre meilleure considération.

Philippe SOLY
Directeur Qualité
Correspondant Matériovigilance