



## Information de sécurité importante

Elsfleth, July, 24 2019

S'il vous plaît assurez-vous dans votre organisation que tous les utilisateurs des produits mentionnés ici et d'autres personnes qui doivent être informés sont informés de ces informations de sécurité. Si vous avez remis les produits mentionnés à des tiers, veuillez leur transmettre une copie de ces renseignements sur la sécurité ou en informer notre personne-ressource ci-dessous.

**Sujet:** Utilisation de nos produits "MediTainer, MediBowl, MediDuo" (tous les codes d'articles) comme support pour instruments/ustensiles stériles pour la zone chirurgicale / salle d'opération.

Cher Client,

Cette lettre est destinée à vous informer d'un problème possible avec la stérilisation des produits ci-dessus lorsqu'il est utilisé comme un support pour les kits chirurgicaux stériles utilisés dans la zone chirurgicale / salle d'opération.

**Objet:**

Selon la documentation technique, MediTainer, MediBowl, MediDuo sont destinés à la réception d'excrétions corporelles et/ou comme récipient de collecte pour les déchets plus petits dans le domaine médical pour une utilisation à court terme.

**Voici ce qui suit :**

Lors d'un examen officiel des produits dans des kits chirurgicaux stérilisés utilisant une méthode standard pour déterminer le nombre total de germes, des supports non stériles ont été détectées.

Nos produits sont faits de matière de fibres moulées (papier) et ne peuvent donc pas être utilisés dans le cadre d'un traitement stérile situé dans la zone chirurgicale / salle d'opération.

**Dangers possible:**

Ce problème peut conduire à la re-contamination des ustensiles chirurgicaux et pourrait donc créer une infection possible des patients lors de l'utilisation d'un kit chirurgical non stérile dans la zone chirurgicale / salle d'opération.

**Action préventive:**

Nos produits MediTainer, MediBowl, MediDuo ne peuvent être utilisés comme support pour les instruments chirurgicaux et les ustensiles chirurgicaux ou une partie d'une autre unité de traitement stérile au sein la zone chirurgicale / salle d'opération.

Veuillez confirmer que vous avez reçu cette « Information de sécurité importante » et nous vous prions d'envoyer une confirmation de réception à notre contact interne: o.hess@cdl-omnipac.com.

Cordialement,

Omni - Pac EKCO GmbH  
Verpackungsmittel  
An der Kaje 1, 26931 Elsfleth  
Tel.: 04404 9874 0

Date: 22/08/2019

Signature: