

«Nom_de_l'établissement_»
Correspondant de matériovigilance-Service Pharmacie
«Titre_de_Civilité»
«Nom_du_Correspondant_de_Matériovigilance»
«Adresse_»
«CP_VILLE_»

Scé. Qualité : ☎ 01 39 92 65 69
✉ nusur@vygon.com

Ecouen, le 23 décembre 2019

Nos réf : 19 0«Chrono_» CO/NU

Objet : URGENT : FSN- Rappel de lot

lifecath broviac code 2191.425 lot 271119GH et lifecath biflux code 2293.70 lot 051119GG

«Titre_de_Civilité»

A la demande du fabricant légal, VYGON GmbH & Co. Kg, nous procédons au rappel de lot des dispositifs **lifecath broviac code 2191.425 lot 271119GH et lifecath biflux code 2293.70 lot 051119GG** que nous distribuons.

Ces dispositifs sont mis à disposition en double emballage stérile. Un défaut de fabrication non systématique a été identifié, celui-ci pourrait être à l'origine d'un défaut de stérilité du conditionnement externe du produit.

Le blister intérieur n'étant pas endommagé, la stérilité du produit lui-même n'est pas compromise.

Nous vous avons adressé au moins un de ces dispositifs **lifecath broviac code 2191.425 lot 271119GH ou lifecath biflux code 2293.70 lot 051119GG**.

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne plus utiliser ces produits et de procéder à leur retrait.

Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception de ce courrier, de compléter et de nous retourner le formulaire ci-joint en y indiquant la quantité retirée dans votre établissement.

L'ANSM est informée de cette information de sécurité.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter directement notre Service Clients au 01.39.92.63.81 ou notre correspondant qualité France, M.MARTIN au 06.11.85.17.92.

Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné et vous prions d'agréer, «Titre_de_Civilité» l'expression de nos salutations distinguées.

Christine OBER - Docteur en Pharmacie

Directeur Qualité / Affaires Réglementaires Postmarché



Accueil
Tél : 01.39.92.63.63
Fax : 01.39.92.64.44
E-mail : questions@vygon.com

Service Clients France
Tél : 01.39.92.63.81
Fax : 01.39.90.29.37
E-mail : commandes@vygon.com

Service Clients Export
Tél : 01.39.92.64.15
Fax : 01.34.29.19.34
E-mail : export.orders@vygon.com

Service Comptabilité
Clients - Tél : 01.39.92.63.65
Fournisseurs - Tél : 01.39.92.63.64
Fax : 01.39.92.64.44



URGENT : FSN-Rappel de lot

lifecath broviac code 2191.425 lot 271119GH et

lifecath biflux code 2293.70 lot 051119GG

ACCUSE DE RECEPTION ET FORMULAIRE DE REPONSE CLIENT page1/1

Veillez compléter et renvoyer ce formulaire par fax : 01 39 92 64 82 ou par e-mail ✉ à : nusur@vygon.com

Nom et Adresse de l'établissement :	«Nom_de_l'établissement_» 19 0«Chrono_» «Client» «CP_VILLE_»
Nom de la personne à contacter :	«Titre_de_Civilité» «Nom_du_Correspondant_de_Matériovigilance»
Fonction :	
☎ Numéro de téléphone :	«Téléphone»
✉ Adresse e-mail :	«email»
📠 Numéro de fax :	«Fax_Alerte_» «Fax_»

Nous attestons avoir procédé au rappel de lots auprès de tous les utilisateurs de notre établissement de santé.

Veillez cocher la case correspondante :

Vous possédez des dispositifs :

Lifecath broviac code 2191.425 lot 271119GH Oui NON Si vous possédez des pièces, nombre de pièces retirées :

Lifecath biflux code 2293.70 lot 051119GG Oui NON Si vous possédez des pièces, nombre de pièces retirées :

Signature et Date :



Accueil
Tél : 01.39.92.63.63
Fax : 01.39.92.64.44
E-mail : questions@vygon.com

Service Clients France
Tél : 01.39.92.63.81
Fax : 01.39.90.29.37
E-mail : commandes@vygon.com

Service Clients Export
Tél : 01.39.92.64.15
Fax : 01.34.29.19.34
E-mail : export.orders@vygon.com

Service Comptabilité
Clients - Tél : 01.39.92.63.65
Fournisseurs : Tél : 01.39.92.63.64
Fax : 01.39.92.64.44



Adresse postale : 8 rue de Paris 95440 Ecouen - France

Siège social : 5 rue Adeline 95440 Ecouen - France

www.vygon.com