



N° TVA : FR 24 400 916 912 00027
67 Chemin Neuf – 69780 TOUSSIEU FRANCE
Tél. : +33 (0) 472 481 490 – Fax : +33 (0) 472 481 491
E-mail : customerservice@doran-int.com



Nom de l'établissement
Adresse
A l'attention de la pharmacie et du
correspondant Matériovigilance

Toussieu, le 12/03/2020

Objet : INFORMATION AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
Produits concernés : Systèmes de perfusion
Type d'action : Rappel d'information sur les précautions d'usage liées à la décontamination des voies d'accès des systèmes de perfusion

Chers Clients, à l'attention des services de soins, de la gestion des risques, de la pharmacie, de la Matériovigilance.

Doran International émet la présente information de bonnes pratiques pour l'ensemble des produits destinés à l'administration parentérale de solutions liquides, médicamenteuses ou non.

Merci d'informer les professionnels de santé que :

Si un désinfectant contenant de l'alcool est utilisé pour la décontamination voies d'accès des dispositifs, s'assurer que le désinfectant est correctement séché avant de procéder à la connexion avec d'autres dispositifs médicaux.

Un contact prolongé de l'alcool sur des matières plastiques peut les fragiliser.

Pour toute information complémentaire concernant cette information, n'hésitez pas à contacter :

- le service qualité au +33472481490 (touche 0 puis 4) ou qualite@doran-int.com

Diffusion de cette information

Merci de diffuser cette information à toute personne étant amenée à utiliser des dispositifs de perfusion ; y compris celle à qui le DM aurait été transféré en dehors de votre organisation.

L'ANSM a été informée de cette action.

Nous faisons de la sécurité des patients notre priorité.

En vous remerciant pour votre coopération, nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sincères salutations.

Amaury Aucan
Responsable qualité et Affaires Réglementaires DORAN

Amaury AUCAN
Quality Manager