

Montpellier , le

Objet : Problème d'utilisation du lève-personnes MOLIFT Partner P205.

Madame, Monsieur, cher Client,

Vous utilisez régulièrement le lève-personnes Partner® 205 et nous vous remercions de la confiance que vous placez en nos produits.

Nous venons récemment d'identifier une contrainte dans l'usage de ce lève-personnes lorsque le patient utilise un lit à hauteur variable.

En effet, pour tous les types de lève-personnes utilisant un vérin; suivant le positionnement et la proximité du lit, celui-ci peut accrocher l'équipement de transfert en phase de montée du lit.



Dans ce seul cas particulier, le lève-personnes peut être déstabilisé et le mât être amené à sortir de l'embase.

Afin d'assurer la qualité des transferts et la sécurité des patients, nous vous demandons bien évidemment de veiller à ne pas reproduire cette situation dans vos manipulations quotidiennes.

Notre service technique prendra contact avec vous dans les semaines à venir afin de planifier une intervention rapide pour éviter ce soucis.

Nous vous rappelons à cette occasion que tous les lève-personnes MOLIFT sont marqués CE et parfaitement conformes à la réglementation et obligations en vigueur.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, cher Client, nos respectueuses salutations.

Pour PRAXIS MEDICAL Technologies

Philippe LOURS
Directeur Commercial

