

**A l'attention des utilisateurs de ventilateurs LEGENDAIR® et SUPPORTAIR® et leurs accessoires Open Pack®**

**REPLACEMENT URGENT DES BATTERIES INTERNES MOLTECH/ACCUTRONICS Rev. D et E utilisées pour les ventilateurs LEGENDAIR® et SUPPORTAIR® et leurs accessoires Open Pack®**

Elancourt, le 20/01/2010

Madame, Monsieur,

En accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, COVIDIEN France S.A.S souhaite vous informer du remplacement urgent des batteries internes MOLTECH/ACCUTRONICS Révision D & E.

Ces batteries sont utilisées sur les ventilateurs LEGENDAIR® et SUPPORTAIR® et leurs accessoires Open Pack®.

Ces batteries internes peuvent subir, dans certaines conditions, une décharge électrostatique provoquant la mise en mode sécurité de la batterie et le déclenchement d'une alarme de sécurité élevée. Le risque est que si le ventilateur fonctionne sur la batterie interne (en raison d'une coupure secteur ou lors d'un déplacement de courte durée) et que le défaut apparait, il peut y avoir arrêt prolongé total de la ventilation à moins de pouvoir brancher à nouveau le ventilateur sur secteur.

Les informations disponibles nous indiquent que seul un nombre limité de batteries en service présentent ce défaut. Cependant, par mesure de précaution, le fabricant a décidé de remplacer toutes les batteries Révisions D & E concernées par ce défaut.

Le remplacement de toutes les Batteries MOLTECH/ACCUTRONICS Revision D& E **est obligatoire** en priorisant le remplacement des batteries internes pour les utilisateurs ventilo-dépendants >20/24h et les batteries présentes dans les Open Pack.

D'après les informations dont nous disposons, votre ventilateur est équipé des batteries concernées par cet échange et nous allons donc réaliser le remplacement des batteries concernées dans les meilleurs délais et reviendrons vers vous très prochainement pour organiser cet échange.

**Dans l'intérim et jusqu'au remplacement de ces batteries, tous les ventilateurs fonctionnant avec des batteries concernées par cet échange ne doivent-êtré utilisés qu'en s'étant assuré que le ventilateur est bien branché sur une prise de courant du secteur. Les patients utilisant un Open Pack avec une batterie concernée ne doivent plus utiliser leur Open Pack à moins de s'assurer d'avoir une prise secteur proche toujours disponible.**

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ce remplacement et nous restons à votre disposition pour tout renseignement concernant cet échange.

Nous vous prions d'agrée, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

**Cyril PUC**  
Pharmacien  
Correspondant Matéiovigilance  
Directeur Economie de Santé &  
Directeur des Affaires Réglementaires