

LETTRE D'INFORMATION

le 19 avril 2010

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur de l'automate WADiana Compact référence 213781 ou 213787.

Nous souhaitons par ce courrier, attirer votre attention sur les implications de l'utilisation de l'option « **Annuler puits** » dans la fonction « **Modifier les résultats** » du logiciel Diana R.

Il est important de noter que l'utilisation de la fonction « **Modifier les résultats** » est une **procédure dégradée** du logiciel et qu'elle se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle son accès est configurable, protégé par mot de passe et tracé dans le système.

L'option « **Annuler puits** » permet à l'utilisateur d'annuler un ou plusieurs puits, ce qui a pour effet d'indiquer au logiciel que l'interprétation des résultats doit se faire **sans tenir compte** du résultat du ou des puits anulés, comme indiqué au paragraphe 2.2.2.1 du Guide de l'Utilisateur du logiciel Diana R.

Etant donné que l'annulation de certains puits n'empêche pas toujours l'interprétation du résultat, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'option « **Annuler puits** ». Si vous souhaitez tout de même annuler un résultat à l'aide de l'option « **Annuler puits** » assurez-vous d'annuler **tous** les puits de chaque carte utilisée pour rendre ce résultat.

Nous vous rappelons que l'accès à la fonction « **Modifier les résultats** » est configurable dans le menu « **Mot de passe** » de la fonction « **Configuration** » du logiciel Diana O (items « **Diana R Enregistrement Série** » et « **Diana R Edition Séries Autres Utilisateurs** »). Pour de plus de précisions se reporter au paragraphe 3.1.2 du Guide de l'Utilisateur du logiciel Diana O.

L'AFSSAPS a été informée de cette communication.

Nous vous prions de vous assurer que tous les utilisateurs de cet automate prennent connaissance de ce courrier et qu'il sera intégré dans la documentation de votre système d'assurance qualité.

Joaquín Alberto
Quality and Regulatory Director