

## **Traduction du courrier Alpha Technologies™**

Date : Avril 2010

A l'attention des utilisateurs d'Alpha Pinnacle avec système de batteries externes, modèle 033-751-107, fourni avec le système Dimension Vista® de Siemens

NOTICE: Alerte sur dysfonctionnement de batteries

Dans le cadre d'un fonctionnement normal d'onduleur, il peut y avoir des cas où une des batteries tombe en panne en raison de son âge, d'une chaleur excessive ou d'un défaut de fabrication. Cela peut occasionner une surcharge des batteries adjacentes.

Les batteries défectueuses, dans ces cas, montrent des signes annonciateurs tels qu'une odeur de soufre ou une surchauffe. Sans prise en compte de ces signes annonciateurs, dans des cas extrêmes, une solution acide corrosive pourrait couler du système de batteries externes.

Alpha Technologies a identifié les batteries concernées lesquelles ont été installées sur des systèmes de batteries externes identifiés par un numéro de série. Nous travaillons en collaboration avec Siemens afin de procéder au remplacement de ces éléments défectueux par de nouvelles batteries.

Ce remplacement sera coordonné par Siemens. Toutefois, et avant que le remplacement n'ait lieu, si vous détectez une odeur de soufre ou une chaleur anormale de votre système de batteries externes, merci de contacter immédiatement le service Assistance Téléphonique de Siemens.

Si vous observez une fuite du système de batteries externes, ne touchez à rien et contactez immédiatement le responsable sécurité de votre laboratoire et suivez les procédures d'exploitation standard pour ce type d'incident.

Greg Powell  
Director, Technical Services  
Alpha Technologies