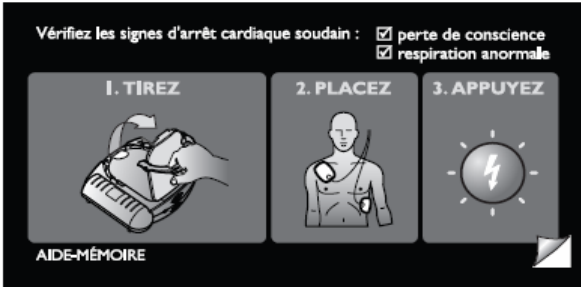



# Notification de sécurité

## Défibrillateurs Philips HS 1

<b>Systèmes concernés</b>	L'Aide-Mémoire fournie avec les défibrillateurs automatisés externes (DAE) Philips HS1, fabriqués par Philips entre <b>octobre 2002 et novembre 2008</b> . Depuis cette date, l'Aide-Mémoire a été mise à jour. Selon nos fichiers votre établissement dispose d'au-moins un de ces dispositifs.
<b>Description du dysfonctionnement</b>	L'Aide-Mémoire fournie avec ces unités a été mise à jour pour une plus grande clarté d'utilisation du DAE.
<b>Risque liés à ce dysfonctionnement</b>	Faire face à l'urgence d'un arrêt cardiaque peut s'avérer stressant pour les personnes non initiées. Si un utilisateur ne suit pas correctement les instructions d'utilisation d'un DAE pour traiter une victime d'un arrêt cardiaque, l'administration de la défibrillation peut en être retardée. Les révisions de l'Aide-Mémoire ont pour objectif d'aider davantage, si nécessaire, les intervenants portant secours en utilisant le défibrillateur.
<b>Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Localisez l'Aide-Mémoire existante, dotée d'une couverture en noir et blanc (comme ci-dessous) de votre HS1. Elle se trouve généralement dans la pochette en plastique transparent de la mallette de transport de votre appareil.</li> </ul>  <p>Vérifiez les signes d'arrêt cardiaque soudain : <input checked="" type="checkbox"/> perte de conscience <input checked="" type="checkbox"/> respiration anormale</p> <p>1. TIREZ      2. PLACEZ      3. APPUYEZ</p> <p>AIDE-MÉMOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez l'Aide-Mémoire par celle jointe à ce courrier, dont la couverture met graphiquement en évidence le bouton de choc orange.</li> </ul>  <p>Vérifiez les signes d'arrêt cardiaque soudain : <input checked="" type="checkbox"/> perte de conscience <input checked="" type="checkbox"/> respiration anormale</p> <p>1 TIREZ      2 PLACEZ      3 APPUYEZ</p> <p>AIDE-MÉMOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nous vous prions de bien vouloir diffuser cette notification auprès de toutes les personnes concernées par les informations qu'elle contient et d'en joindre un exemplaire dans le manuel utilisateur de votre système. Si vous avez transmis l'appareil à une autre personne, nous vous demandons de lui envoyer une copie de cet avertissement et de nous fournir aussi rapidement que possible ses coordonnées.</li> </ul>