

Nom Didier FAVERDIN
Division **Healthcare**
Entité H IM SERV.CLTS RA
Téléphone 0820 80 75 69
Email didier.faverdin@siemens.com
Nos ref : **MI010/10/S**
Med10-2010-let56-df

Siemens S.A.S., healthcare SERV.CLTS MAINTENANCE RD,
9, boulevard Finot, 93527 Saint-Denis CEDEX 2

**A l'attention du Directeur de l'Etablissement et
du Correspondant Local de Matéiovigilance**
Département Médecine Nucléaire

Date 2 juillet 2010

LETTRE RECOMMANDEE AVEC A/R référencée MI010/10/S

N°

**Note de sécurité relative à la table patient associée à la Gamma-caméra
E.CAM de marque SIEMENS**

Poste technique :
Modification Molecular Imaging : MI010/10/S
Matériel concerné : Lit Patient E.CAM ®

Cher Client,

Le but de Siemens Healthcare est de vous fournir des produits et des services de qualité maximale afin d'assurer votre satisfaction.

Récemment, un cas de blessure d'un patient nous a été rapporté ; celui-ci a saisi le côté de la table pendant que le manipulateur la reculait vers sa position initiale.
Durant ce mouvement, le patient s'est blessé en se coinçant un doigt entre un montant fixe et une partie mobile de la table.

Comme il est décrit dans le manuel d'utilisation de l'E.CAM, nous voudrions vous rappeler de toujours aider et contrôler le patient lorsqu'il est installé sur la table et lors d'un déplacement de celle-ci. En plus, merci de suivre les instructions suivantes :

- Ne laissez jamais le patient sans surveillance lorsqu'il est allongé sur la table d'examen
- Rappelez aux patients (et aux utilisateurs) de conserver les mains au-dessus du plateau de la table d'examen et éloignées des côtés du système pour éviter tout contact éventuel avec les détecteurs, les montants du lit.
- Lors du déplacement du patient vers ou en sortant du statif, assurez-vous que ses doigts et ses bras soient entièrement placés à l'intérieur de la table pour éviter un risque de blessure avec les montants du lit.
- Le manipulateur doit s'assurer, en déplaçant le lit et/ou des accessoires, qu'aucun risque de blessure ne peut arriver au patient suite à ces mouvements.

Siemens S.A.S.
Groupe : Healthcare

Adresse :
9, boulevard Finot
93527 Saint-Denis CEDEX 2

Tél. : +33 1 4922 3100
Fax : +33 1 4922 3413

Société par Actions Simplifiée au capital de 22.000.000 euros
9, boulevard Finot - 93527 Saint-Denis CEDEX 2
SIREN : 562 016 774 - Ident. T.V.A FR20 562 016 774; R.C.S. Bobigny B 562 016 774 - APE : 518L
N° CCP : 30041 00001 00469 80W020 35 - N° BNP Paribas : 30004 00828 00010414267 76

- Avant ou au cours d'un mouvement du système, vérifiez toutes les zones pour être sûr qu'aucun objet n'obstrue le déplacement.
- Nous vous remercions de votre attention concernant cette note de sécurité et vous demandons d'informer l'ensemble du personnel concerné par les systèmes E.CAM. Veuillez vous assurer que cette note de sécurité est classée dans votre manuel de l'utilisateur, au chapitre « consignes de sécurité ».

L'Afssaps a été informée de cette note de sécurité adressée aux utilisateurs concernés.

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez contacter le Centre d'Appel National de SIEMENS Healthcare France au **0 820 80 75 69**.

Vous remerciant de votre attention concernant cette note de sécurité, nous vous assurons de notre engagement à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la qualité de vos équipements.

Veillez agréer, Cher Client, nos respectueuses salutations.

Didier FAVERDIN
Responsable Activité Médecine Nucléaire

Nadia ZENNOUDA
Ingénieur Affaires Réglementaires