

## **Informations de sécurité importantes**

### **Intervalles de maintenance pour les suspensions techniques plafonnières klinoPORT et incarePORT conformément au manuel d'utilisation**

Cher client, cher utilisateur,

Dans le cadre de notre évaluation permanente des risques, nous avons complété les consignes de maintenance du manuel d'utilisation des suspensions techniques plafonnières klinoPORT et incarePORT (Cf Annexe 2).

Veillez noter que les produits concernés ont été vendus jusqu'en 2001 par la société Kreuzer GmbH + Co.KG puis par la société TRUMPF Kreuzer GmbH + Co.KG jusqu'en 2008.

#### **Description du problème et cause décelée :**

Dans le cadre de la surveillance des produits, nous avons constaté que certains vérins à gaz montés sur des suspensions techniques plafonnières pouvaient montrer des défaillances, n'ayant pas été contrôlés à la suite de plusieurs maintenances imposées non réalisées.

Les vérins à gaz présentait un dysfonctionnement se traduisant par un abaissement lent du statif au repos.

Si le système de réglage en hauteur est utilisé avec un vérin à gaz défectueux, il peut arriver que le statif ne soit pas correctement libéré et qu'il s'abaisse.

#### **Que doit faire l'utilisateur ?**

1. Actualisez votre manuel d'utilisation des klinoPORT et incarePORT avec les informations de l'annexe 2.  
Si vous souhaitez recevoir une version complète actualisée du manuel d'utilisation, contactez le service technique.
2. En tant qu'opérateur, vérifiez la date de la dernière maintenance et faites effectuer une maintenance si nécessaire. Pour cela, contactez notre service technique à TRUMPF AMSA à CLERMONT-FERRAND (Tél 04.73.19.50.55).

#### **Distribution des présentes informations**

Direction :  
Dr. phil. nat. Kordt Griepenkerl  
074 746  
Dr. Klaus Frank

TRUMPF Medizin Systeme GmbH, siège à Saalfeld  
Tribunal d'instance de Jena HRB 202895, N° de TVA intracomm. DE 143

Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG Coburg  
Deutsche Bank AG Erfurt  
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

(code banque 783 200 76) N° de compte 4 823 400  
(code banque 820 700 00) N° de compte 3 741 550  
(code banque 830 503 03) N° de compte 1 910

S.W.I.F.T. HYVE DE MM 480  
S.W.I.F.T. DEUT BE 8E  
S.W.I.F.T. HELA DEF 1 SAR

Veillez à ce que toute personne de votre organisme utilisant les produits nommés ci-dessus soient informée des présentes **informations de sécurité importantes**. Si vous avez cédé le produit à un tiers, veuillez lui faire parvenir une copie des présentes informations ou bien informer le contact ci-dessous.

Veillez conserver les présentes informations jusqu'à la fin de la mesure.

Les autorités compétentes ont reçu une copie des présentes Informations de sécurité importante.

**Accusé de réception**

Veillez accuser réception des présentes informations de sécurité importantes en nous renvoyant le formulaire de l'annexe 1 dûment rempli.

**Interlocuteur TRUMPF :**

TRUMPF Medizin Systeme GmbH

Dr. Manfred Fehn

Carl-Zeiss-Str. 7-9

D-07318 Saalfeld

Tél. : +49 3671 586 41 211

Télécopie : +49 3671 586 41 215

incident@de.trumpf.com

www.trumpf.com



Dr. Manfred Fehn

Responsable qualité

Annexes :

Annexe 1      Accusé de réception

Annexe 2      Modifications apportées au chapitre Contrôles, maintenances et réparations