
Alerte Matériorvigilance

Conseils donnés par le fabricant concernant l'utilisation en toute sécurité des dispositifs suivants:

PENTAX Sources de lumières portables BS-LH1 ; BS-LH2 ; BS-LL1

Emetteur:

PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Str. 104
22527 Hamburg - Allemagne

Destinataires:

Les utilisateurs et les opérateurs

Détails des dispositifs concernés:

- PENTAX Source de lumière halogène BS-LH1
- PENTAX Source de lumière halogène BS-LH2
- PENTAX Source de lumière LED BS-LL1

Description du problème:

HOYA Corporation PENTAX Life Care Division a récemment reçu un rapport sur un incident qui s'est produit dans un hôpital chinois. Lors d'un examen, une batterie au lithium incorporée dans une source de lumière halogène PENTAX Source BS-LH2 a explosé, ce qui a causé de graves blessures à l'utilisateur, notamment la brûlure de la cornée oculaire gauche. Aucune blessure du patient n'a été signalée.

Nos recherches ont révélé que la batterie utilisée dans cet hôpital n'était pas un modèle spécifié dans le manuel d'utilisation de la source BS-LH2. Les piles spécifiées, ci-dessous, sont les seules conformes pour une utilisation en toute sécurité des sources de lumière PENTAX:

- DURACELL DL 123A - PANASONIC CR 123A - SANYO CR 123A

PENTAX France Life Care S.A.S.
112 quai de Bezons - BP 204
95106 ARGENTEUIL CEDEX
Tél. : +33(0)1 30 25 75 75
Fax général : +33(0)1 30 25 96 81
Fax commercial et service : +33(0)1 30 25 74 45
www.pentax.fr

Mesures à prendre par les destinataires:

Nous vous invitons à faire en sorte que lorsque vous ou d'autres personnes au sein de votre organisation utilisez des sources de lumière PENTAX (BS-LH1/BS-LH2/BS-LL1) que les instructions décrites dans le manuel d'utilisation soient rigoureusement respectées et que seules les piles au lithium spécifiées, ci-dessus, seront utilisées.

Si vous ou d'autres personnes au sein de votre organisation utilisez d'autres batteries que celles mentionnées, ci-dessus, vous devez les remplacer.

Une attention particulière doit être appliquée dans le cadre d'utilisation de piles au lithium. Une utilisation incorrecte peut entraîner une surchauffe, voire même une explosion. Nous vous demandons de porter une attention toute particulière lors de l'utilisation de ces batteries.

Transmission de cette information de Matériovigilance:

Assurez-vous, qu'au sein de votre organisation, que tous les utilisateurs des dispositifs mentionnés, ci-dessus, et toutes autres personnes concernées aient accès à cette information.

Si vous avez revendu ces appareils à des tiers, nous vous sollicitons pour leur transmettre cette information également.

Nous vous prions de conserver cette information jusqu'à ce que cette action ait été réalisée.

Personnes à contacter :

Pour l'Europe :

Me Kristin RUPPRECHT
Safety & Quality officer
LIFE CARE SERVICE
Julius-Vosseler-Str. 104
22527 HAMBOURG – Germany
Phone : +49 (0) 40 561 92 375
Fax : +49 (0) 40 561 92 333
Email : rupprecht.kristin@pentax.de

Pour la France :

M. Pascal CHAPEL
Correspondant Local Matériovigilance
LIFE CARE SERVICE
112, quai de Bezons
95100 ARGENTEUIL – France
Tél. : +33 (0)1 3025 8228
Fax : +33 (0)1 3025 9470
Email : chapel.pascal@pentax.fr