

Assurance Qualité
SC/QA/Oxydase (10/2010)

Objet : Disque d'identification Oxydase – référence 53832 – lot 0J3371

Madame, Monsieur,

A la suite de plusieurs remontées clients, le produit suivant a été expertisé :

- Oxydase
- Référence Catalogue: 53832
- Lot: **0J3371**
- Date d'expiration: 05-11-2011

Ce contrôle a permis de mettre en évidence une baisse de sensibilité du lot mentionné ci-dessus.

La recherche de l'oxydase peut se faire selon plusieurs méthodes. L'une des plus couramment utilisée consiste à placer un disque d'oxydase sur une lame porte-objet, à l'imbiber avec une goutte d'eau physiologique stérile puis à déposer 1 à 2 colonies pures fraîchement isolées sur le disque.

Avec les disques du lot 0J3371, une réaction faiblement positive voir négative peut être observée avec des souches oxydase positives (telle que *Pseudomonadaceae*, *Neisseria*) lorsque testées suivant la procédure de dépôt direct des colonies sur le disque.

Ce disque permet une différenciation présomptive de certaines bactéries à Gram négatif. Avec le lot ci-dessus, les résultats du test d'oxydase seront en contradiction avec les autres caractéristiques de la souche testée, comme sa morphologie, et ce sont donc les tests d'identification biochimique, réalisés en parallèle, qui seront déterminants pour caractériser la souche testée.

Par conséquent, nous vous demandons de ne plus utiliser ce lot **0J3371** et de détruire toutes les cartouches que vous pourriez avoir en stock. Un nouveau lot sera mis en stock à compter du 29 octobre pour échange. L'Afssaps a été informée de cette communication.

Pour procéder à l'échange nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter votre correspondant Bio-Rad habituel.

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés par cette situation.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Sylvie CONFIDA
Directeur Assurance Qualité