

A l'attention de MME M. XXXXXXXXX

Parçay-Meslay, Le 04/10/2010

**Objet : CHASSIS BAS DES LITS CORONA L6000 V8
INFORMATION DE SECURITE EN ACCORD AVEC L'AFSSAPS**

Madame, Monsieur,

DESCRIPTION :

- Une faiblesse des soudures du châssis des lits fabriqués **entre octobre 2005 et mars 2006** peut conduire à une altération des soudures sur le châssis bas en cas de brancardage intensif, ce qui peut entraîner à long terme et très progressivement un affaissement du lit (cas qui n'a à ce jour jamais été rencontré).

LITS CONCERNES :

- lits de la série L6 version 8 de votre parc (voir photo pour identification).

DETECTION :

- Ceci est détectable dans le cadre de la maintenance préventive annuelle des lits (Cf. les points 19 et 20 de notre document d'accompagnement des lits (livré avec chaque lit))

SUPPORT / ACTIONS :

- Si vous constatez une altération des soudures, mettez dans la mesure du possible le lit à l'écart et contactez CORONA au 02 47 88 58 75,
- CORONA SERVICES (02 47 88 58 75) peut effectuer l'audit de votre parc.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués.

**CORONA MEDICAL
Division CORONA SERVICES / QUALITE**