

INFORMATIONS - RECOMMANDATIONS

Le rapport de patient LifeCycle en français imprime des pages supplémentaires

Code du produit	Nom du produit	Lot/Version du produit
5002-0020	LifeCycle for Prenatal Screening	v3.1 Rev2, v3.2

À l'attention des correspondants locaux de réactovigilance, directeurs d'établissements de santé et des responsables de laboratoires

Cher client,

Conformément à la réglementation et en accord avec l'Afssaps, nous souhaitons vous informer des précautions suivantes. Nos activités d'assurance qualité ont révélé que dans certaines situations, le rapport de patient personnalisé LifeCycle en français imprime des pages supplémentaires. Le rapport personnalisé ne fait pas partie du logiciel LifeCycle par défaut et il a par conséquent été installé uniquement sur demande spécifique.

Le rapport généré est erroné lorsque la base de données contient des données de précédentes grossesses pour une mère. Les impressions du rapport de patient en français se composent alors des pages de données sur la grossesse actuelle, auxquelles viennent s'ajouter des pages supplémentaires de données sur les précédentes grossesses. Dans ce cas :

- les données sur la grossesse actuelle s'impriment toujours correctement
- les pages supplémentaires sur les précédentes grossesses comportent des informations contradictoires ou des données sont manquantes
 - les données démographiques sont basées sur le cas le plus récent
 - la valeur du risque rapportée se réfère à la précédente grossesse
 - les données de concentration des analytes sont manquantes

Le rapport de patient de votre installation LifeCycle actuelle peut être concerné par cette erreur s'il n'a pas encore été contrôlé/corrigé par un représentant du fabricant. La correction est gratuite et si elle n'a pas encore été effectuée, vous serez rapidement contacté par votre représentant PerkinElmer (Wallac Oy) local.

Entretiens, veuillez porter une attention particulière au problème décrit ci-dessus si vous le rencontrez. Ces pages supplémentaires sont certes gênantes, mais elles sont faciles à déceler et nous vous recommandons de les éliminer.

Veuillez informer toutes les personnes de votre entité éventuellement concernées par ce problème.

Nous vous prions de nous excuser des problèmes causés et nous apprécions votre aide en la matière. Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec l'équipe Software Services (SpecimenGateSupportFI@perkinelmer.com) ou votre représentant PerkinElmer local.

Maija Seppälä
Directrice de la qualité
Wallac Oy

R2010009