

Lettre d'Information

Analyseurs concernés : Lecteurs de glycémie/corps cétoniques StatStrip®

CIB N° : 03-10SS

Date : Décembre 2010

Réassignation des valeurs de contrôles de qualité pour les StatStrip® Glu/Ket

Cher utilisateur de StatStrip®,

Une récente revue des données concernant les contrôles pour StatStrip® Glu/Ket indique que les valeurs cibles ont besoin d'être réassignées pour les lots et les références suivantes :

Réf. 46947 lots : 0409274301, 0410076301, 0410154301, 0410244301

Réf. 46948 lots : 0409153302, 0410168302

Réf. 46949 lots : 0410111303, 0410242303, 0410154303, 0409155303, 0410323303

	Paramètre	Nouvelles valeurs
Réf. 46947 Niveau 1	Corps Cétoniques (Ket)	0,00 – 0,5 mmol/L
Réf. 46948 Niveau 2	Corps Cétoniques (Ket)	0,4 – 1,2 mmol/L
Réf. 46949 Niveau 3	Corps Cétoniques (Ket)	1,5 – 3,3 mmol/L

Merci de communiquer ce bulletin aux personnels concernés et si nécessaire de mettre à jour les fourchettes des contrôles de qualité.

Pour les lecteurs connectés, l'utilisation de NovaNet en temps que gestionnaire d'instruments permet de réassigner par l'informatique les valeurs des contrôles où cela est nécessaire. Cette mise à jour est à faire une seule fois.

Les prochaines livraisons de ces lots se feront avec des étiquettes et des labels incluant les nouvelles valeurs.

Pour toutes questions complémentaires à propos de ce bulletin, merci de contacter notre support technique au 0825 000 216.

Nova Biomedical vous remercie pour la confiance que vous lui accordez.