

Nom                    Laurent CALATAYUD  
Entité                H IM SERVICE CLIENT MAINT. AX

Siemens S.A.S., H IM SERVICE CLIENT MAINT. AX, 9, boulevard Finot,  
93527 Saint-Denis Cedex 2

---

Téléphone        0 820 80 75 69  
Fax                +33 1 4922-3059  
email             laurent.calatayud@siemens.com  
Date                24 mars 2011

## LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N°

### Note importante de sécurité relative aux systèmes AXIOM Aristos FX et FX Plus concernant un possible dysfonctionnement du frein du moteur de rotation du détecteur.

Poste technique :  
Modification : **XP016/10/S**

Cher(e) Client(e),

Par ce courrier nous souhaitons vous informer d'un éventuel dysfonctionnement et d'un risque potentiel pour les patients, lors de l'utilisation de la rotation du détecteur sur tous les systèmes Axiom Aristos FX et FX Plus (Matériel n° 7414803 et Matériel n° 10093864) de numéro de série inférieur ou équivalent à 1216.

#### Quand ce dysfonctionnement se produit-il et quels sont les risques potentiels ?

Lors de l'utilisation de la rotation du moteur du détecteur dans l'axe Alpha, celui-ci peut basculer inopinément soit pendant les mouvements, soit en mode « verticale », soit en mode « table ».

Si cela se produit en mode « verticale », le détecteur peut venir heurter les membres inférieurs du patient. Une attention particulière doit donc être prêtée afin d'éviter toute blessure aux patients.

**Siemens S.A.S.**  
Groupe :

Adresse :  
Siemens S.A.S.  
H IM SERVICE CLIENT MAINT.  
AX  
9, boulevard Finot  
93527 Saint-Denis Cedex 2

Tél. : +33 1 4922 3100  
Fax : +33 1 4922 3413

### Comment ce problème sera-t-il finalement résolu ?

Siemens prépare une modification des systèmes Axiom Aristos FX et FX Plus qui résoudra dysfonctionnement potentiel. La modification est disponible depuis février 2011 et sera mise en place fin mai 2011.

Nous vous remercions de votre compréhension concernant cette information de sécurité et vous serions reconnaissants d'en informer l'ensemble du personnel concerné. Merci de vous assurer que cette note de sécurité est classée dans les notices d'utilisation de votre équipement dans le chapitre sécurité.

Si vous avez vendu cet équipement ou s'il n'est plus en votre possession, nous vous prions de bien vouloir transmettre cette lettre au nouveau propriétaire de l'équipement et de nous en informer.

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez contacter le Centre d'Appel National de SIEMENS SAS Healthcare France au **0 820 80 75 69**.

Veillez agréer, Cher(e) Client(e), nos respectueuses salutations.

Laurent CALATAYUD  
Responsable d'Activité Radiologie

Nadia ZENNOUDA  
Ingénieur Affaires réglementaires