

## **Informations de sécurité**

concernant

### ***L'EndoVIMS- Vidéo Laparoscope, modèle VSX10030HD***

---

**Auteur:** VIMS

**Destinataire :** Utilisateurs des EndoVims vidéo laparoscope.

**Identification du matériel Médical :**


Les optiques VIMS 30° peuvent être considérées de manière isolée (VSX10030HD) ou appartenant à un ensemble (Système de vidéo gainable = VLS et VSX)

**Fabricant:** VIMS  
13, rue du Cassé  
31 240 Saint Jean  
[sav@vims-system.com](mailto:sav@vims-system.com)  
Tel : +33 5 34 45 09 09  
Fax : +33 5 61 22 85 84

**Distributeur:** ....

**Description du problème, y compris de la cause déterminée :**

Cet onglet métallique en partie proximale du laparoscope est fixé sur l'endoscope afin de maintenir la gaine à usage unique LW dans sa position initiale. Dans de rares cas, il arrive que cet onglet se désolidarise de l'endoscope.

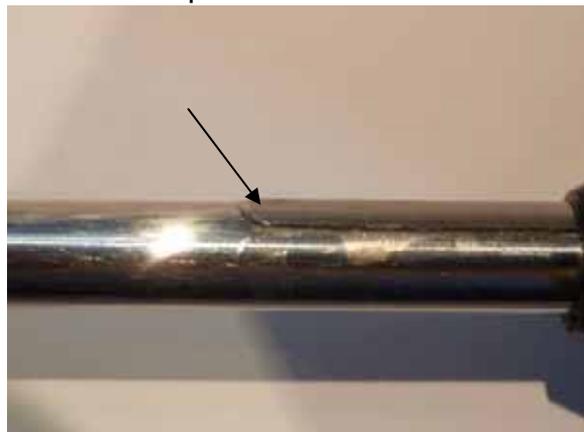

Si l'onglet métallique est absent de l'endoscope, le maintien de la gaine n'est plus parfaitement assuré et l'utilisateur peut alors endommager la lentille de la gaine à usage unique, LW 10030. Dans le cas extrême, la lentille peut casser.

La stérilité du dispositif peut être compromise dans le cas où la casse de la lentille de la gaine se produit.

### **Quelles mesures doivent être prises par l'utilisateur?**

Nous considérons qu'il est important que les utilisateurs des caméras VSX 10030HD prennent garde à ne pas utiliser de caméra sans onglet. S'il s'avère que l'onglet est absent de la caméra, il est important de contacter le Service Après Vente de VIMS directement ou via votre distributeur.

Nous vous remercions de transmettre à tous les utilisateurs des ensembles VIMS cette information afin d'être sûr qu'aucune VSX 10030 ne sera utilisée sans onglet métallique.

Cette information doit être conservée avec le dispositif afin que les futurs utilisateurs aient conscience de cette indication.

### **Contact:**

Vous pouvez joindre VIMS par téléphone au : +33 5 34 45 09 09

VIMS

13, rue du Cassé

31 240 Saint Jean

[sav@vims-system.com](mailto:sav@vims-system.com)

Tel : +33 5 34 45 09 09

Fax : +33 5 61 22 85 84