

# NOTICE DE SECURITE URGENTE

Place  
Getinge Disinfection AB, Växjö, Sweden  
Date  
2011-03-21  
Issued by  
RA Peter C Carlsson  
Subject:  
Getinge Washer Disinfector 8666 and 8668

Our identity mark  
GD0007  
Revision  
1  
Page  
1 (1)  
Distribution:  
Affected Sales Companies

## ***Domaine d'application***

Cette note de sécurité (FSN) concerne les laveurs désinfecteurs 8666 et 8668 équipés de l'option d'analyseur d'eau. Seul le numéro de série figurant dans l'annexe ci-joint est concerné.

## ***Contexte***

Lors des prélèvements, il est possible de rentrer en contact à proximité de la vanne de prélèvement de partie non isolée du thermostat surchauffe. Les laveurs désinfecteurs concernés par cette FSN sont équipés d'une vanne située sur le puisard de la cuve permettant la prise d'échantillon d'eau. Ce relevé est effectué lorsque le laveur est en fonctionnement donc sous tension. Pour accéder à la vanne, il faut retirer une tôle d'habillage. Prêt de la vanne se situe le thermostat de sécurité chauffage. Les cosses de raccordement électrique de ce composant ne sont pas isolées électriquement.

## ***Analyse des risques***

Il est possible, par inadvertance, de rentrer en contact avec une partie sous tension non isolée tout en faisant un prélèvement d'échantillon d'eau. Cela peut provoquer un risque d'électrisation pour l'opérateur.

## ***Mesure à prendre***

Ne pas accéder à la vanne lorsque l'équipement est sous tension jusqu'à ce que le kit de correction incluant une protection isolante du thermostat de sécurité chauffage soit installé.

## ***Prochaine étape***

Le responsable secteur GETINGE HEALTHCARE doit prendre contact avec le client avant le 15 avril pour planifier une intervention afin de mettre en place le correctif protégeant électriquement le thermostat de surchauffe. Ce nouveau thermostat permet d'isoler les parties sous tension.

Commander gratuitement les kits à GETINGE DESINFECTON. Les références des kits sont fournies dans le fichier joint. Tous les laveurs devront être corrigés avant le 30 juin.

Le fichier ci-joint devra être renseigné avec la date de la correction et retourné à Peter C Carlsson, GETINGE DESINFECTON.

## ***Diffusion de cette FSN***

Cette note doit être diffusée à tous ceux qui ont besoin d'être au courant au sein de votre société. La lettre d'information client doit être envoyée au client final.

# AVIS DE CORRECTION EQUIPEMENT

## LAVEUR DESINFECTEUR GETINGE

Date: 1 er Avril 2011

### ***Résumé***

Nous signalons un problème qui concerne les laveurs désinfecteurs 8666 et 8668 équipés de l'option analyseur d'eau.

Lors des prélèvements d'eau, il est possible de rentrer en contact à proximité de la vanne avec une partie sous tension non isolée du thermostat surchauffe. Les laveurs désinfecteurs concernés sont équipés d'une vanne située sur le puisard de la cuve permettant la prise d'échantillon d'eau. Ce relevé est effectué lorsque le laveur est en fonctionnement donc sous tension. Pour accéder à la vanne, il faut retirer une tôle d'habillage. Prêt de la vanne se situe le thermostat de sécurité chauffage. Les cosses de raccordement électrique de ce composant ne sont pas isolées électriquement.

### ***Analyse des risques***

Il est possible, par inadvertance, de rentrer en contact avec une partie sous tension non isolée tout en faisant un prélèvement d'échantillon d'eau. Cela peut provoquer un risque d'électrisation pour l'opérateur.

### ***Mesure à prendre***

Ne pas accéder à la vanne lorsque l'équipement est sous tension jusqu'à ce que le kit de correction incluant une protection isolante du thermostat de sécurité chauffage soit installé.

GETINGE HEALTHCARE prend des mesures pour remplacer le Thermostat. Cette correction reste à la charge de GETINGE.

### ***Instructions***

Un représentant du service après vente de GETINGE HEALTHCARE va vous contacter pour planifier une intervention pour installer le kit de remplacement. Si vous avez des questions concernant ce rendez vous, merci de contacter votre responsable secteur Jean Marc DESPREZ au 06.23.86.70.84.

Nous apprécions votre patience pendant que nous travaillons à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. GETINGE regrette tous les inconvénients que cela pourrait vous causer. Notre priorité reste que les équipements GETINGE vous apportent toute satisfaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 01.64.86.89.00.

Cordialement.

Damien VALAIRE  
Responsable Qualité