

Nom Laurent CALATAYUD
Entité SWE RC-FR H IM CS TS AX&SP

Siemens S.A.S., SWE RC-FR H IM CS TS AX&SP, 9, boulevard Finot,
93527 Saint-Denis Cedex 2

Téléphone 0 820 80 75 69
Fax +33 1 4922-3059
email laurent.calatayud@siemens.com

Date 23 mai 2011

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR N°

Note importante de sécurité relative aux systèmes Ysio

Poste technique :
Modification : **XP009/11/S**

Cher(e) Client(e),

Par ce courrier, nous souhaitons vous informer d'un risque potentiel pour le personnel ou pour les patients, lors de l'abaissement de la table de l'Ysio (matériels référence 10281013 / 10281163).

Quand cela se produit-il et quels sont les risques potentiels ?

Si les membres inférieurs des patients ou du personnel sont placés en dessous de la table et que l'utilisateur baisse le panneau de table, il y a risque de collision et de blessure des membres inférieurs des patients ou du personnel.

Une attention particulière doit donc être prise lors de l'ajustement de la hauteur de la table afin d'éviter toute blessure aux patients ou au personnel.

Siemens S.A.S.
Groupe :

Adresse :
Siemens S.A.S.
SWE RC-FR H IM CS TS AX&SP
9, boulevard Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2

Tél. : +33 1 4922 3100
Fax : +33 1 4922 3413

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Quelles mesures l'utilisateur peut-il prendre pour éviter ce problème ?

L'utilisateur doit éviter de positionner toutes parties du corps du patient ou du personnel sous la table ou dans toute autre zone possible de collision lors des mouvements motorisés du système. Ces instructions sont déjà présentes dans le manuel d'utilisation du système (chapitre sécurité : mouvements, zones de danger / points dangereux).

Nous vous prions de trouver en annexe un complément d'informations (AXB7-020.623.07.01.03).

Nous vous remercions de votre compréhension concernant cette information de sécurité et vous serions reconnaissants d'en informer l'ensemble du personnel concerné. Merci de vous assurer que cette note de sécurité ainsi que son annexe sont classées dans le guide d'utilisation de votre équipement.

Si vous avez vendu cet équipement ou s'il n'est plus en votre possession, nous vous prions de bien vouloir transmettre cette lettre au nouveau propriétaire de l'équipement et de nous en informer.

L'AFSSAPS a été informée de l'envoi de cette lettre.

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez contacter le Centre d'Appel National de SIEMENS SAS Healthcare France au **0 820 80 75 69**.

Veillez agréer, Cher(e) Client(e), nos respectueuses salutations.

Laurent CALATAYUD
Responsable d'Activité Radiologie

Nadia ZENNOUDA
Ingénieur Affaires réglementaires

Zones dangereuses

Cette information souligne l'importance des zones dangereuses déjà décrites dans le manuel d'utilisation du système (voir *Zones dangereuses/points dangereux...* → 28).

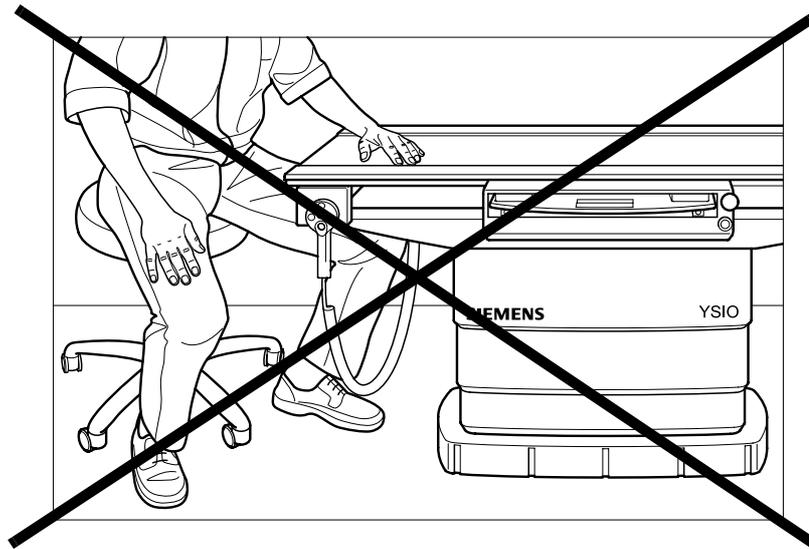


Fig. 1: Patient assis, genoux sous la table d'examen (positionnement non autorisé)

La figure 1 représente un positionnement particulier du patient. Ce positionnement n'est pas autorisé car il présente un risque en cas de déplacement de la table vers le bas.

De manière générale, veuillez observer les règles suivantes :

- Evitez que des personnes ou objets se trouvent dans la zone de pivotement ou de rotation des statifs, et dans la zone de montée/descente ou de rotation de la table d'examen.
- Assurez-vous que les genoux des assistants assis ou patients ne se sont pas au-dessous d'un statif ou du plateau d'examen.

Pour de plus amples informations générales sur les mouvements de l'appareil, voir la partie Informations sur les mouvements des appareils → 22 du manuel d'utilisation du système.

