

## IMPORTANT

A l'attention du  
Responsable de Laboratoire,  
Directeur des Etablissements de Santé,  
Correspondant de Réactovigilance

Craponne, le 16 août 2011  
Réf. : bM/DF/mf/11 – 138/

**INFORMATION IMPORTANTE  
MISE A JOUR DE PROTOCOLE  
VIDAS® Chlamydia - REF.30101**

Madame, Monsieur,

Vous êtes utilisateur du réactif VIDAS® **Chlamydia** (référence 30101) et nous vous remercions de votre confiance.

Récemment, certains clients utilisateurs de différents lots de VIDAS® **Chlamydia** (référence 30101) ont observé un accroissement du taux de résultats faussement positifs. Les investigations menées par nos services ont confirmé cet accroissement.

Des recherches sont actuellement en cours afin d'identifier l'origine de cette anomalie.

La notice n'impose pas la confirmation des résultats positifs. Un résultat faussement positif peut entraîner la mise en place d'un traitement antibiotique non requis.

Du fait de l'augmentation du taux de résultats faussement positifs, nous vous demandons de :

1. confirmer tous les patients pour lesquels un résultat positif a été obtenu avec le coffret VIDAS® **Chlamydia**, quel que soit le numéro de lot, à l'aide d'une technique de confirmation,
2. compléter et nous renvoyer l'accusé de réception ci-joint.

Cette mesure doit être appliquée sur tous les lots, jusqu'à ce que bioMérieux vous informe de nouvelles préconisations.

L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a été informée de cette action.

Conscient des perturbations que cette situation peut engendrer dans l'organisation de votre laboratoire, notre Centre de Relation Client se tient à votre disposition pour tout complément d'information au :

☎ : 0 820 22 90 90

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Dominique FRANCHINI**  
Support Applications  
Centre de Relation-Client

**BIOMERIEUX**

## ACCUSE DE RECEPTION

A RETOURNER AU CENTRE RELATION CLIENT

fax : 04 78 87 20 91

NOM DU LABORATOIRE: .....

CP - VILLE: .....

NUMERO DE TELEPHONE CLIENT : .....

Code client :

N° de notification :

J'ai bien pris connaissance du courrier de bioMérieux demandant la confirmation de tous les patients pour lesquels un résultat positif a été obtenu avec le coffret VIDAS® Chlamydia (référence 30101), à l'aide d'un test complémentaire.

DATE .....

SIGNATURE : .....

BIOMERIEUX