

**HemoCue France**  
3 rue Louis Fournier  
77 100 MEAUX

Tél. : 01 60 44 05 05  
Fax : 01 60 44 05 10  
E-mail: hemocue@hemocue.fr

A l'attention des services de  
néonatalogie utilisateurs des systèmes  
HemoCue® Glucose RT et Glucose DM  
RT

## **NOTIFICATION URGENTE DE SECURITE**

Dispositifs concernés : HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT  
Identification : 12-07-2011  
Action : action corrective

### **Information concernant la diminution de la température d'utilisation de 30 à 27°C (86 à 80°F).**

Lors d'une investigation suite à une plainte concernant des résultats incorrects en néonatalogie en Allemagne, il a été révélé un risque de résultats faussement élevés dans un environnement au dessus de 27°C. Dans de rares cas, ceci risque d'entraîner un risque clinique.  
Pour assurer des résultats précis, HemoCue a décidé de descendre la température de fonctionnement de 30 à 27°C (86 à 80°C).  
La nouvelle température de fonctionnement est donc de 15 à 27°C (59 à 80°C).

### **Température de stockage des microcuvettes**

Notez qu'il n'y a aucune modification sur la température de stockage. Les microcuvettes doivent être stockées entre 0 à 30°C (32 à 86°C).

### **Mise à jour du manuel d'utilisation**

Pour le système HemoCue® Glucose RT, échanger le manuel d'utilisation d'origine avec manuel d'utilisation révisé.  
Pour le système HemoCue® Glucose DM RT, le manuel d'utilisation révisé sera envoyé début septembre 2011.

### **Transmission de la notice d'avertissement**

Cette notice doit être communiquée à toutes les personnes susceptibles d'être averties.  
SVP, signez cette vérification et la retournez à HemoCue® AB.

Cette signature confirme la transmission d'information auprès des autorités compétentes.  
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés par cette information.  
Pour toute question supplémentaire, envoyer un e-mail à [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr).

Cordialement,

HEMOCUE® AB  
Agneta Tufvesson Alm  
Global Product Manager Glucose

Charlotte Wiktorson  
Dir Quality & Regulatory Management

HEMOCUE® FRANCE  
Florence Beauvallet  
Chef de Produits

## Field Safety Notice Vérification

**Identification** : 12-07-2011 neo

Je certifie avoir lu et compris l'information contenu dans l'avis ci-dessus concernant le changement de température de fonctionnement (15-27°C) pour les systèmes HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose RT et je confirme que le manuel d'utilisation a été changé.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose DM RT

Date :

Signature :

Nom en majuscule :

Adresse complète :

**SVP, retourner à :**

E-mail : [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr) ou fax : 01 60 44 05 10

**HemoCue France**

3 rue Louis Fournier  
77 100 MEAUX

Tél. : 01 60 44 05 05

Fax : 01 60 44 05 10

E-mail: [hemocue@hemocue.fr](mailto:hemocue@hemocue.fr)

A l'attention des utilisateurs du  
système HemoCue® Glucose RT et  
Glucose DM RT

**NOTIFICATION URGENTE DE SECURITE**

Dispositifs concernés : HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT

Identification : 12-07-2011

Action : action correctrice

**Information concernant la diminution de la température d'utilisation de 30 à 27°C (86 à 80°F).**

Lors d'une investigation suite à une plainte, il a été révélé un risque de résultats faussement élevés dans un environnement au dessus de 27°C. Dans de rares cas, ceci risque d'entraîner un risque clinique.

Pour assurer des résultats précis, HemoCue a décidé de descendre la température de fonctionnement de 30 à 27°C (86 à 80°C).

La nouvelle température de fonctionnement est donc de 15 à 27°C (59 à 80°C).

**Température de stockage des microcuvettes**

Notez qu'il n'y a aucune modification sur la température de stockage. Les microcuvettes doivent être stockées entre 0 à 30°C (32 à 86°C).

**Mise à jour du manuel d'utilisation**

Pour le système HemoCue® Glucose RT, échanger le manuel d'utilisation d'origine avec manuel d'utilisation révisé.

Pour le système HemoCue® Glucose DM RT, le manuel d'utilisation révisé sera envoyé début septembre 2011.

**Transmission de la notice d'avertissement**

Cette notice doit être communiquée à toutes les personnes susceptibles d'être averties.

SVP, signez cette vérification et la retournez à HemoCue® AB.

Cette signature confirme la transmission d'information auprès des autorités compétentes.

Nous sommes désolés pour les inconvénients causés par cette information.

Pour toute question supplémentaire, envoyer un e-mail à [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr).

Cordialement,

HEMOCUE® AB

Agneta Tufvesson Alm  
Global Product Manager Glucose

Charlotte Wiktorson  
Dir Quality & Regulatory Management

HEMOCUE® France

Florence Beauvallet  
Chef de produits

SARL au capital de 40 000 Euros

3 rue Louis Fournier 77 100 MEAUX • Tel : 01 60 44 05 05 • Télécopie : 01 60 44 05 10 •

Siret : 43504137100038 • APE : 4646Z • RCS MEAUX 435041371 •

N° TVA Intracommunautaire : FR 86435041371

**Field Safety Notice vérification**

**Identification** : 12-07-2011

Je certifie avoir lu et compris l'information contenu dans l'avis ci-dessus concernant le changement de température de fonctionnement (15-27°C) pour les systèmes HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose RT et je confirme que le manuel d'utilisation a été changé.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose DM RT

Date :

Signature :

Nom en majuscule :

Adresse complète :

**SVP, retourner à :**

E-mail : [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr) ou fax : 01 60 44 05 10

## **HemoCue France**

3 rue Louis Fournier  
77 100 MEAUX

Tél. : 01 60 44 05 05

Fax : 01 60 44 05 10

E-mail: [hemocue@hemocue.fr](mailto:hemocue@hemocue.fr)

A l'attention des utilisateurs du système HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT

### **NOTIFICATION URGENTE DE SECURITE**

Dispositifs concernés : HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT

Identification : 12-07-2011

Action : action corrective

#### **Information concernant la diminution de la température d'utilisation de 30 à 27°C (86 à 80°F).**

Lors d'une investigation suite à une plainte, il a été révélé un risque de résultats faussement élevés dans un environnement au dessus de 27°C. Dans de rares cas, ceci risque d'entraîner un risque clinique.

Pour assurer des résultats précis, HemoCue a décidé de descendre la température de fonctionnement de 30 à 27°C (86 à 80°C).

La nouvelle température de fonctionnement est donc de 15 à 27°C (59 à 80°C).

#### **Température de stockage des microcuvettes**

Notez qu'il n'y a aucune modification sur la température de stockage. Les microcuvettes doivent être stockées entre 0 à 30°C (32 à 86°C).

#### **Mise à jour du manuel d'utilisation**

Pour le système HemoCue® Glucose RT, échanger le manuel d'utilisation d'origine avec manuel d'utilisation révisé.

Pour le système HemoCue® Glucose DM RT, le manuel d'utilisation révisé sera envoyé début septembre 2011.

#### **Transmission de la notice d'avertissement**

Cette notice doit être communiquée à toutes les personnes susceptibles d'être averties.

SVP, signez cette vérification et la retournez à HemoCue® AB.

Cette signature confirme la transmission d'information auprès des autorités compétentes.

Nous sommes désolés pour les inconvénients causés par cette information.

Pour toute question supplémentaire, envoyer un e-mail à [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr).

Cordialement,

HEMOCUE® AB

Agneta Tufvesson Alm  
Global Product Manager Glucose

Charlotte Wiktorson  
Dir Quality & Regulatory Management

HEMOCUE® France

Florence Beauvallet  
Chef de produits

SARL au capital de 40 000 Euros

3 rue Louis Fournier 77 100 MEAUX • Tel : 01 60 44 05 05 • Télécopie : 01 60 44 05 10 •

Siret : 43504137100038 • APE : 4646Z • RCS MEAUX 435041371 •

N° TVA Intracommunautaire : FR 86435041371

**Field Safety Notice vérification**

**Identification** : 12-07-2011

Je certifie avoir lu et compris l'information contenu dans l'avis ci-dessus concernant le changement de température de fonctionnement (15-27°C) pour les systèmes HemoCue® Glucose RT et Glucose DM RT.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose RT et je confirme que le manuel d'utilisation a été changé.

Je suis un utilisateur de HemoCue® Glucose DM RT

Date :

Signature :

Nom en majuscule :

Adresse complète :

**SVP, retourner à :**

E-mail : [info@hemocue.fr](mailto:info@hemocue.fr) ou fax : 01 60 44 05 10